


## PLEXTALK POCKET PTP1

### Handleiding

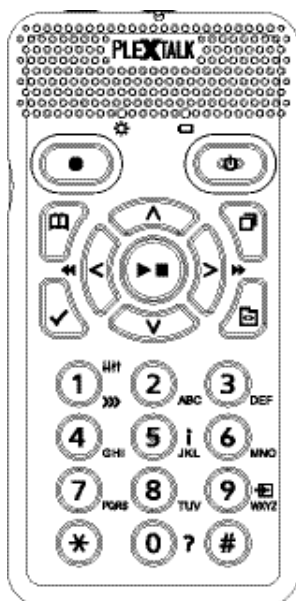

MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by  
Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia.  
<http://www.iis.fra.de/irm/>

## Inhoudsopgave

<b>PLEXTALK POCKET PTP1</b> .....	<b>1</b>
<b>0 Inhoud verpakking</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Afspelfuncties voor alle formaten</b> .....	<b>6</b>
1.1. Een SD-kaart of een USB-medium opnieuw plaatsen. ....	7
1.2. Weergave starten en stoppen.....	7
1.3. Het afspeelvolume wijzigen. ....	7
1.4. Het begeleidingsvolume wijzigen.....	9
1.5. De afspeelsnelheid wijzigen.....	9
1.6. De audiotoon wijzigen.....	10
1.7. Het navigatiemenu oproepen.....	11
1.8. Hoe groepeert de PLEXTALK bestanden en mappen? .....	12
1.9. De SD-kaart of het USB-medium selecteren. ....	13
1.10. Navigeren in mappen en titels. ....	13
1.11. Informatie over uw SD-kaart of USB-medium opvragen. ....	15
1.12. Naar het begin of het einde van een item gaan. ....	16
1.13. Snel vooruit of snel achteruit.....	17
1.14. Bladwijzers gebruiken.....	17
1.14.1. Soorten bladwijzers. ....	18
1.14.2. Bladwijzers instellen.....	18
1.14.3. Navigeren naar bladwijzers. ....	20
1.14.4. Bladwijzers verwijderen.....	22
1.14.5. Stem voor spraakbladwijzers in- en uitschakelen.....	24
1.15. Het ingebouwde helpbestand. ....	24
1.15.1. Het ingebouwde helpbestand oproepen.....	24
1.15.2. Informatie in het helpbestand oproepen.....	25
<b>2. DAISY-titels weergeven</b> .....	<b>26</b>
2.1. Kop-, pagina- en titelinformatie oproepen.....	26
2.2. Kopnavigatie.....	27
2.3. Paginanavigatie.....	29
2.4. Groepsnavigatie.....	30
2.5. Zinnavigatie.....	31
2.6. Een afspelerstand selecteren.....	31
<b>3. Audiobestanden of muziek-cd's weergeven</b> .....	<b>32</b>
3.1. Meer informatie over audiobestanden.....	33
3.2. Meer informatie over de afspeelvolgorde.....	34
3.3. Beperkingen voor audiobestanden.....	35
3.4. Bestands- en albuminformatie opvragen. ....	35
3.5. Spoor navigatie.....	36

3.6. Albumnavigatie. ....	37
3.7. Een afspeelstand selecteren.....	38
<b>4. Tekstbestanden weergeven.....</b>	<b>39</b>
4.1. Informatie over het tekstbestand opvragen.....	39
4.2. Verschillen tussen gewone tekstbestanden en HTML- bestanden.....	40
4.3. Navigeren op percentage.....	41
4.4. Navigeren op basis van paragraaf, zin, woord of teken. ....	41
4.5. Navigeren op basis van het niveau “enkel HTML-bestanden”. .....	42
4.6. Een afspeelstand selecteren.....	42
<b>5. Algemene informatie over opnamen.....</b>	<b>43</b>
5.1. Opnameapparatuur.....	44
5.2. Opnamemedia. ....	45
5.3. Algemene opnametips. ....	45
5.4. Opnamestanden en geluidskwaliteit. ....	46
5.5. Technische informatie over opnamestanden en geluidskwaliteiten.....	47
5.5.1. Instellingen voor de opnamestand.....	48
5.5.2. Instellingen voor voorgeprogrammeerde opnamestanden. .....	48
5.5.3. Beschikbare instellingen voor de stand “aangepast” .....	50
5.5.4. Beschikbare opnametijd voor de diverse geluidskwaliteiten. ....	51
<b>6. Een DAISY-titel opnemen en bewerken.....</b>	<b>52</b>
6.1. Basisinformatie voor opnamen met de PLEXTALK.....	52
6.2. Opnametoestanden. ....	53
6.3. Een lege SD-kaart plaatsen. ....	53
6.4. Fundamentele opnametechniek.....	54
6.5. De begeleidingsstem uitschakelen tijdens de opname. ....	55
6.6. Een ingangsbron aansluiten en selecteren.....	56
6.7. Een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit selecteren. ....	58
6.7.1. Een voorgeprogrammeerde opnamestand selecteren. ..	58
6.7.2. De opnamestand “aangepast” selecteren. ....	59
6.8. De titel selecteren waarin u wenst op te nemen. ....	61
6.9. Het opnameniveau instellen.....	62
6.10. De niveaumontor gebruiken. ....	64
6.11. De opnamemonitor in- en uitschakelen.....	65

6.12.	Opname-informatie opvragen. ....	65
6.13.	Kopmerkers bewerken tijdens de opname. ....	66
6.14.	Kopmerkers bewerken na de opname. ....	67
6.14.1.	Een kop instellen na de opname. ....	67
6.14.2.	Een kopinstelling na de opname annuleren. ....	68
6.15.	Eén of meer secties wissen. ....	69
6.16.	Een nieuwe titel maken. ....	70
6.17.	Een titel wissen. ....	71
6.18.	Een DAISY-titel opbouwen. ....	71
6.19.	Bewerken van een DAISY-titel voorbereiden. ....	72
<b>7.</b>	<b>Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken. ....</b>	<b>73</b>
7.1.	Informatie opvragen over spraakmemo's. ....	73
7.2.	Een nieuwe spraakmemo opnemen. ....	74
7.3.	Bestaande spraakmemo's beluisteren. ....	75
7.4.	Reservekopie van spraakmemo's maken op SD-kaart. ....	76
7.5.	Spraakmemo's wissen. ....	76
<b>8.</b>	<b>Functies voor mediabeheer. ....</b>	<b>77</b>
8.1.	Beschikbare media. ....	77
8.2.	Algemene informatie over reservekopieën. ....	78
8.3.	Reservekopie maken van spraakmemo's. ....	79
8.4.	Reservekopie maken van DAISY-titels. ....	79
8.4.1.	Reservekopie maken van een DAISY-titel van een SD-kaart naar een extern USB-medium. ....	79
8.4.2.	Reservekopie maken van een DAISY-titel van een extern USB-medium naar een SD-kaart. ....	80
8.4.3.	Reservekopietijd voor DAISY-media. ....	81
8.5.	Reservekopie maken van audiobestanden/muziek-cd. ....	81
8.5.1.	Reservekopie maken van audiobestanden van een SD-kaart naar een extern USB-medium. ....	82
8.5.2.	Reservekopie maken van audiobestanden/muziek-cd naar een SD-kaart. ....	83
8.5.3.	Reservekopietijd voor audiobestanden/muziek-cd. ....	84
8.6.	Reservekopie maken van tekstbestanden. ....	84
8.6.1.	Reservekopie maken van een tekstbestand van een SD-kaart naar een extern USB-medium. ....	84
8.6.2.	Reservekopie maken van een tekstbestand van een extern USB-medium naar een SD-kaart. ....	85
8.7.	Een SD-kaart wissen. ....	86
8.8.	Een extern USB medium wissen. ....	86

## 0 Inhoud verpakking

- Nederlandstalige verkorte handleiding (zwartdruk)
- Engelstalige Quick Guide (zwartdruk)
- Engelstalige handleiding op CD (.txt, .doc)
- Plectalk PTP1 speler
- Batterij (zelf te plaatsen)
- Koptelefoon, model oortjes. Deze draden aan de oortjes zijn niet even lang (11 cm en 50 cm). Het lange stuk dient over de nek gedragen te worden, zodat de oortjes beter blijven zitten.
- USB kabel
- USB adapter om bv. een USB stick aan te sluiten op de PTP1
- Adapter
- Bescherm en draaghoesje (onderin de verpakking)
- 2Gb geheugenkaart (zit in de speler).

# 1. Afspeelfuncties voor alle formaten.

Alle in dit hoofdstuk vermelde bewerkingen gelden voor het weergeven van DAISY-titels, audiobestanden en tekstbestanden. Voor u verder gaat, is het belangrijk dat u deze termen in de context van deze handleiding goed begrijpt.

- Een DAISY-titel is een DAISY-boek op een SD-kaart of een USB-medium. Zowel SD-kaarten als USB-stations kunnen één of meer DAISY-titels bevatten. Elke DAISY-titel moet in zijn eigen map staan. De audiobestanden in de DAISY-titel moeten het formaat Wave, MP3 of AMR-WB+ hebben. DAISY-titels kunnen enkel worden opgenomen of bewerkt op een SD-kaart.
- Audiobestanden die geen deel uitmaken van een DAISY-titel, kunnen als afzonderlijke bestanden of in een map worden opgeslagen op een SD-kaart of op een USB-medium. PLEXTALK pocket kan audiobestanden met de volgende bestandsformaten herkennen en weergeven: MP3, Wave en AMR-WB+. Audiobestanden kunnen niet worden bewerkt op de PLEXTALK pocket.
- Tekstbestanden zijn bestanden in gewoon tekstformaat of in HTML-formaat. Ze kunnen als individuele bestanden of in een map worden opgeslagen op een SD-kaart of op een USB-medium. Tekstbestanden kunnen niet worden bewerkt op de PLEXTALK pocket.

U kunt de functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, uitproberen naarmate u verder gaat. Als u dit wenst te doen, dient u eerst een SD-kaart met de nodige inhoud in de SD-kaartsleuf te plaatsen, zoals beschreven in hoofdstuk 5.10.

**OPGELET:** De PLEXTALK pocket is enkel compatibel met SD- of SDHC-kaarten. Als u een andere geheugenkaart zoals een memory stick of MMC insteekt, veroorzaakt u een storing. Gebruik dergelijke media dus niet.

## 1.1. Een SD-kaart of een USB-medium opnieuw plaatsen.

Als u een SD-kaart of een USB-medium voor het eerst in de PLEXTALK plaatst, begint het afspelen vanaf de eerste titel. Als u hetzelfde medium later opnieuw plaatst, begint de PLEXTALK, ongeacht het formaat van de gegevens, met het afspelen vanaf de plaats waar u de vorige keer bent gestopt. Dit is vooral handig als u SD-kaarten of USB-media dient te wisselen en daarna terug wenst te keren naar het eerste medium, bijvoorbeeld als u studeert en u verschillende boeken dient te raadplegen.

## 1.2. Weergave starten en stoppen.

Ga als volgt te werk om het afspelen te starten en te stoppen:

**Tip:** De toets Start/Stop is de blauwe, ronde toets met het verzonken oppervlak in het midden van het toestel, tussen de 2 paar navigatietoetsen.

- Om het afspelen te starten, drukt u op de toets Start/Stop. De PLEXTALK start het afspelen vanaf de positie waar u het laatst bent gestopt.
- Om het afspelen te stoppen, drukt u op de toets Start/Stop.

**Opmerking:** Als een boek of een album tot aan het einde werd weergegeven, stopt het afspelen automatisch, tenzij u een afspeelstand kiest die voorrang heeft op deze actie. Door op de toets Start/Stop te drukken wanneer het boek of het album tot aan het einde werd weergegeven, begint het afspelen van het boek of het album weer vanaf het begin.

## 1.3. Het afspeelvolumewijzigen.

**Tip:** De volumeschakelaar is de bovenste schakelaar aan de rechterzijde van de PLEXTALK.

U kunt het volume instellen op een schaal van 0 tot 25, in stappen van 1, waarbij 0 stil is en 25 de luidst mogelijke instelling is.

- Om het afspeelvolume te verhogen, duwt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omhoog, waarbij het volume telkens met 1 instelling toeneemt. U kunt de volumeschakelaar ook omhoog vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.
- Om het afspeelvolume te verminderen, trekt u de volumeschakelaar herhaaldelijk omlaag, waarbij het volume telkens met 1 instelling vermindert. U kunt de volumeschakelaar ook omlaag vasthouden tot het volume het gewenste niveau bereikt.

Als de PLEXTALK niet speelt, hoort u een pieptoon telkens wanneer u het volume aanpast en hoort u het geselecteerde volumeniveau, bijvoorbeeld: "Volume 16". U hoort een hogere pieptoon aan het begin en het einde van het instelbereik en u hoort een lagere pieptoon in de middenpositie, waar het volume op 13 staat. Als u de volumetoets ingedrukt houdt, hoort u een aantal pieptonen om aan te geven dat de volume-instelling wijzigt, tot u de hoogste of de laagste instelling bereikt. Ook hier hebben de hoogste en laagste instellingen een hogere pieptoon, terwijl de middelste instelling een lagere pieptoon heeft.

Als de PLEXTALK speelt hoort u, telkens wanneer u het volume aanpast, een pieptoon, maar het geselecteerde volume wordt niet uitgesproken. U hoort een hogere pieptoon aan het begin en het einde van het instelbereik en u hoort een lagere pieptoon in de positie waar het volume op 13 staat. Als u de volumetoets ingedrukt houdt, hoort u een aantal pieptonen om aan te geven dat de volume-instelling wijzigt, tot u de hoogste of de laagste instelling bereikt. Ook hier hebben de hoogste en laagste instellingen een hogere pieptoon, terwijl de middelste instelling een lagere pieptoon heeft.



## 1.4. Het begeleidingsvolume wijzigen.

De interne stem die door de PLEXTALK wordt gegenereerd, wordt de begeleidingsstem genoemd. Het volume van de begeleidingsstem kan samen met het afspeelvolume worden aangepast. Het volume van de begeleidingsstem kan echter ook onafhankelijk worden aangepast. Als u wenst dat het begeleidingsvolume en het afspeelvolume samen worden aangepast, gebruikt u de procedure die in de vorige paragraaf werd beschreven. Het begeleidingsvolume neemt toe of af naarmate u het afspeelvolume aanpast.

Als u het begeleidingsvolume onafhankelijk wenst in te stellen, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie systeeminstellingen te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets enter of start/stop.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “begeleidingsvolume selecteren” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter of Start/Stop.
- Gebruik de toets Links of Rechts om het gewenste volume voor de begeleiding in te stellen, waarna u de instelling bevestigt met de toets Enter. De PLEXTALK hanteert voortaan het nieuwe begeleidingsvolume en het menusysteem wordt afgesloten.

## 1.5. De afspeelsnelheid wijzigen.

Er zijn 11 snelheden voorzien van -2 tot +8, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast. De normale snelheid is de stand 0. -2 is de helft van de normale snelheid, +4 is de dubbele snelheid en +8 de driedubbele snelheid.

- Als u de afspeelsnelheid wenst te verhogen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets naar boven op de

navigatietoets. De begeleiding kondigt de door u geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “snelheid +2”. Als de PLEXTALK afspeelt, wordt het afspelen tijdelijk gestopt terwijl u uw aanpassingen uitvoert.

- Om de afspeelsnelheid te verlagen, drukt u één keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Neer. De begeleiding kondigt de door u geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “snelheid -1”. Als de PLEXTALK afspeelt, wordt het afspelen tijdelijk gestopt terwijl u uw aanpassingen uitvoert.

**Opmerking:** Telkens wanneer u een aanpassing uitvoert, hoort u een pieptoon. Een hoge pieptoon geeft de bovenste of onderste positie van het beschikbare bereik aan, terwijl een lage pieptoon de normale snelheid aangeeft.

**Opmerking:** Als u de toets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de snelheidsinstelling snel in de geselecteerde richting. U hoeft dan niet herhaaldelijk op de toets te drukken.

## 1.6. De audiotoon wijzigen.

Er zijn 13 tooninstellingen voorzien van -6 tot +6, die telkens met 1 niveau tegelijk kunnen worden aangepast. De standaardinstelling ligt in het midden van het bereik; dit is de neutrale instelling. Als u van de onderste naar de bovenste instelling in het beschikbare bereik gaat, hoort u de toon van het geluid veranderen van meer lage tonen naar meer hoge tonen.

- Om de toon te verhogen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de navigatietoets Op. De begeleiding kondigt de door u geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “Toon +5”. Als de PLEXTALK afspeelt, wordt het afspelen tijdelijk gestopt terwijl u uw aanpassingen uitvoert.
- Om de toon te verlagen, drukt u twee keer op cijfertoets 1 en daarna op de toets Neer. De begeleiding kondigt de door u geselecteerde instelling aan, bijvoorbeeld “Toon -3”. Als de PLEXTALK weergeeft, wordt het afspelen tijdelijk gestopt terwijl u uw aanpassingen uitvoert.

**Opmerking:** Telkens wanneer u een aanpassing uitvoert, hoort u een pieptoon. Een hoge pieptoon geeft de bovenste of onderste positie van het beschikbare bereik aan, terwijl een lage pieptoon de normale toonpositie aangeeft.

**Opmerking:** Als u de navigatietoets Op of Neer ingedrukt houdt, wijzigt de tooninstelling snel in de geselecteerde richting. U hoeft dan niet herhaaldelijk op de toets te drukken.

## 1.7. Het navigatiemenu oproepen.

Eén van de handigste functies van de PLEXTALK bestaat erin dat u zelf kunt kiezen hoe u wenst te navigeren. Dit gebeurt aan de hand van het navigatiemenu, dat u altijd kunt oproepen, tenzij u zich reeds in het hoofdmenu bevindt.

Ga als volgt te werk om het navigatiemenu te gebruiken:

- We gaan er hierbij van uit dat de PLEXTALK niet opneemt en dat u zich niet in het hoofdmenu bevindt. Gebruik de toetsen Op of Neer om omhoog of omlaag te gaan. De items die worden uitgesproken, zijn de opties die op dat ogenblik beschikbaar zijn in het navigatiemenu.
- De beschikbare opties zijn afhankelijk van het soort inhoud dat u gebruikt en van de structuur van de gegevens. In DAISY-titels verschijnt bijvoorbeeld de optie “Pagina” niet in het navigatiemenu als er geen pagina’s in het boek gecodeerd zijn. Als er bij audiobestanden slechts één album is, is er ook geen optie “album” in het navigatiemenu. De PLEXTALK biedt dus enkel de navigatiemogelijkheden aan die op dat ogenblik voor u zinvol zijn.
- Als u de gewenste navigatiemethode heeft geselecteerd, kunt u met de toetsen Links of Rechts vooruit of achteruit gaan in het door u gekozen navigatieniveau. Voorbeeld: als u de ingebouwde gebruikshandleiding gebruikt en u gaat met de toets Op of Neer naar de optie “Niveau 1”, kunt u, als u daarna de toets Links of Rechts gebruikt, vooruit of achteruit gaan naar de volgende kop op niveau 1.

**Opmerking:** Het standaardnavigatieniveau voor DAISY-titels is “Niveau 1”, voor audiobestanden is dit “Spoor” en voor tekstbestanden is dit “Paragraaf”. De momenteel geselecteerde navigatieniveaus worden niet bewaard als u de PLEXTALK uitschakelt.

**Opmerking:** Als u niet weet welke navigatie in een bepaald item mogelijk is, kunt u dit snel controleren met de toets Op of Neer.

## 1.8. Hoe groepeert de PLEXTALK bestanden en mappen?

Aan het begin van dit hoofdstuk heeft u basisinformatie gekregen m.b.t. het formaat van de bestanden die de PLEXTALK kan hanteren. We hebben ook gezien hoe u de bestanden op een SD-kaart of op een USB-medium kunt opslaan. Naast deze eenvoudige regels gelden er voor de PLEXTALK slechts enkele andere beperkingen op de manier waarop u de te lezen items dient op te slaan.

Als de PLEXTALK de SD-kaart of het USB-medium oproept, worden de inhoud en de groepsitems automatisch geëvalueerd als “DAISY-titels”, “audiobestanden” en “tekstbestanden”, ongeacht waar deze items opgeslagen zijn op het medium. Als u daarna door de titels navigeert, zijn ze reeds voor u geordend, ongeacht waar ze zich fysiek op het medium bevinden.

Voorbeeld: als u 3 tekstbestanden in de hoofdmap heeft en 2 andere tekstbestanden in een submap, toont de PLEXTALK deze als 5 tekstbestanden die opgeslagen zijn in 2 mappen.

Voor audiobestanden voert de PLEXTALK een gelijkaardige evaluatie uit, maar bovendien worden alle audiobestanden in één enkele logische map gegroepeerd. Dit maakt de titelnavigatie eenvoudiger. Als er dus 10 audiobestanden in de hoofdmap staan, 5 andere audiobestanden in map A en nog eens 5 andere in map B, groepeert de PLEXTALK deze 3 mappen in één enkele logische map met de naam “Audio” als u op titel navigeert.

DAISY-titels moeten, samen met alle vereiste bestanden, in dezelfde map staan. De PLEXTALK evalueert geen inhoud in een submap van een map waarin een DAISY-boek werd geïdentificeerd.

Doordat de PLEXTALK de inhoud van de media op die manier automatisch evalueert, kunt u uw informatie zeer flexibel archiveren, terwijl u de gewenste informatie zeer snel kunt oproepen.

**Opmerking:** Als er verschillende soorten inhoud is, zoals DAISY-titels, audiobestanden of tekstbestanden, sorteert de PLEXTALK ze automatisch op type en naam.

## 1.9. De SD-kaart of het USB-medium selecteren.

Soms wenst u over te schakelen van een SD-kaart naar een USB-medium of vice versa. U kunt dit als volgt doen:

- Druk herhaaldelijk op de titeltoets tot het gewenste medium wordt aangekondigd. De PLEXTALK doorloopt de 3 mogelijke opties één voor één: “SD-kaart”, “USB” en “Sprakmemo”. Voor de SD-kaart en het USB-medium kondigt de PLEXTALK het item aan dat het laatst werd weergegeven op dat medium.
- Als er geen kaart of USB-medium geplaatst is, zegt de PLEXTALK “geen SD-kaart” of “geen USB-medium”, gevolgd door “Titel bestaat niet. Selecteer een ander medium”
- Als u het gesproken item wenst weer te geven, drukt u gewoon op de toets Enter.
- Als er een SD-kaart of een USB-medium geplaatst is, gebruikt u de toets Links of Rechts om de beschikbare inhoud op dat medium te doorbladeren.
- Als u bij het item komt dat u wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop, waarna het afspelen begint in de laatste afspelpositie van dat item.

## 1.10. Navigeren in mappen en titels.

Als er verschillende items op de SD-kaart of op het USB-medium staan, kunt u omschakelen van het item dat u momenteel beluistert, naar een ander item. Dit andere item kan zich in dezelfde map of elders op het medium bevinden. Daartoe gebruikt u de toets Titel.

Om in mappen te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk herhaaldelijk op de toets Titel tot u het medium hoort waarnaar u wenst te gaan.
- Druk op de toets Op om mapnavigatie te selecteren. De PLEXTALK zegt “Selecteer map”.
- Druk op de toets Links of Rechts om de beschikbare mappen één voor één te doorlopen.
- Terwijl u uw selectie verplaatst, vermeldt de begeleidingssysteem het nummer van de map. De eerste zin van de eerste titel in de map wordt daarna weergegeven.
- Als deze map de gewenste titel bevat, drukt u op de toets Neer om naar de titelnavigatie te gaan. De PLEXTALK zegt “Selecteer titel”.
- Druk op de toets Links of Rechts om de titels in de map te doorlopen. De PLEXTALK zegt het nummer van de titel en geeft daarna de eerste zin van de titel weer, zodat u hem gemakkelijk kunt identificeren.
- Als u de geselecteerde titel wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop. Het afspelen begint automatisch vanaf de positie in de titel waar u voordien bent gestopt.

**Opmerking:** Alle audiobestanden worden gegroepeerd in één enkele logische map met de naam “Audio”. Om naar deze map te gaan, dient u eerst op Enter of Start/Stop te drukken, waarna u “Album” of “Spoor” selecteert in het navigatiemenu.

**Opmerking:** De PLEXTALK gebruikt standaard de titelnavigatie als u voor het eerst op de toets Titel drukt.

Om op titel te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk herhaaldelijk op de toets Titel tot u het medium hoort waarnaar u wenst te gaan.
- De PLEXTALK is normaal gezien automatisch ingesteld op titelnavigatie, maar u kunt dit controleren met de toets Op of Neer.
- Druk op de toets Links of Rechts om de beschikbare titels één voor één te doorlopen.
- Terwijl u uw selectie verplaatst, zegt de begeleidingsstem het medium, of de titel een DAISY-titel, audiobestand of tekstbestand is, en het nummer ervan. De eerste zin van de titel wordt daarna weergegeven, zodat u hem gemakkelijker kunt identificeren.
- Als u de geselecteerde titel wenst weer te geven, drukt u op de toets Start/Stop. Het afspelen begint automatisch vanaf de positie in de titel waar u voordien bent gestopt.

### **1.11. Informatie over uw SD-kaart of USB-medium opvragen.**

Soms wenst u de status van de SD-kaart of van het USB-medium te controleren. U kunt diverse informatie opvragen:

- Terwijl de SD-kaart of het USB-medium geplaatst is, zorgt u ervoor dat de PLEXTALK naar het gewenste medium gaat door op de toets Titel te drukken tot het gewenste medium wordt aangekondigd.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “Mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “Mediatitelinformatie” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

- De PLEXTALK kondigt het soort medium aan, de gebruikte ruimte op het medium, de totale grootte van het medium, het formaat van het huidige item en zijn grootte. Bij SD-kaarten wordt ook aangegeven of de kaart al dan niet vergrendeld is.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, drukt u op de toets Enter om het menusysteem te verlaten.

**Opmerking:** Afhankelijk van de status van uw SD-kaart of uw USB-medium wordt bepaalde informatie eventueel niet aangekondigd. Voorbeeld: als u een gefinaliseerde disk als een extern USB cd-medium heeft geplaatst, is er geen vrije ruimte beschikbaar op de schijf en wordt deze informatie ook niet vermeld.

**Opmerking:** U kunt informatie over het USB-medium op dezelfde manier opvragen, maar u kunt met de PLEXTALK niet opnemen op het USB-medium.

## 1.12. Naar het begin of het einde van een item gaan.

Het is handig als u snel naar het begin of het einde van het huidige item kunt gaan. Hoewel de begeleiding lichtjes verschilt, is de basisfunctie hetzelfde voor alle formaten.

**Tip:** De toets Ga-Naar is de toets links boven van de vier functietoetsen.

Om naar het begin van een item te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar. De begeleidingsstem zegt “Ga naar kop”, afhankelijk van het soort gegevens dat u gebruikt. Daarna hoort u een gesproken herinnering dat de toets Enter nu kan worden ingedrukt om naar het begin te gaan.
- Druk op de toets Enter, waarna het afspelen naar de start van het huidige item gaat. De begeleidingsstem zegt “begin titel” of “Begin van album”.
- Na een korte pauze begint het afspelen automatisch vanaf het begin.



Om naar het einde van een item te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar. De begeleidingssysteem zegt “Ga naar kop”. Daarna hoort u een gesproken herinnering dat cijfertoets 0 gevolgd door de toets Enter nu kan worden ingedrukt om naar het einde te gaan.
- Druk op cijfertoets 0 gevolgd door de toets Enter, waarna het afspelenpositie naar het einde van het huidige item gaat. De begeleidingssysteem zegt “Einde titel” of “Einde album”.

### **1.13. Snel vooruit of snel achteruit.**

Voor de functies snel vooruit en snel achteruit gebruikt u de toetsen Links en Rechts aan beide zijden van de toets Enter.

- Om snel achteruit te gaan, houdt u de toets Links ingedrukt. Het afspelen start van zodra u de toets loslaat.
- Om snel vooruit te gaan, houdt u de toets Rechts ingedrukt. Het afspelen start van zodra u de toets loslaat.

**Opmerking:** . Als u de toets Links of Rechts ingedrukt houdt, wordt snel vooruit of achteruit gegaan in stappen van 5 seconden, 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 10 minuten, 20 minuten enz. Als u de toets loslaat voor de optie “10 minuten” wordt gezegd, begint het afspelen op de plaats waar u de toets loslaat. Als u de toets voorbij dit punt loslaat, wordt verder vooruit of achteruit gegaan tot u de toets Start/Stop indrukt om het proces te stoppen. Het afspelen begint daarna automatisch.

### **1.14. Bladwijzers gebruiken.**

Bladwijzers vormen een zeer handige manier om vlotter te navigeren in een DAISY-titel, een audiobestand of een tekstbestand. In dit hoofdstuk verneemt u alles over de verschillende soorten bladwijzers, hoe u een bladwijzer kunt instellen, ernaar kunt navigeren en hem kunt verwijderen.

### 1.14.1. Soorten bladwijzers.

In de PLEXTALK kunt u de volgende 3 soorten bladwijzers gebruiken:

- Genummerde bladwijzers – U kunt tot 10.000 genummerde bladwijzers instellen. Aan elke bladwijzer wordt een uniek nummer tussen 1 en 9999 toegewezen. Als u de limiet van 10.000 probeert te overschrijden, wordt de oudste bladwijzer automatisch verwijderd voor de nieuwe bladwijzer wordt gemaakt.
- Spraakbladwijzers – Dit zijn genummerde bladwijzers met een begeleidende spraaknotitie. Spraakbladwijzers nemen geheugenruimte in. Het totale beschikbare geheugen komt overeen met een opnametijd van 30 minuten. Als u deze waarde probeert te overschrijden, wordt de oudste bladwijzer automatisch verwijderd voor de nieuwe bladwijzer wordt gemaakt.
- Herneembladwijzers – Voor elke titel, elk album of elk tekstbestand wordt de huidige afspeellocatie opgeslagen, zodat het afspelen verder kan worden gezet vanaf die locatie als u de titel, het album of het tekstbestand later opnieuw gebruikt.

**Opmerking:** De PLEXTALK onthoudt de herneembladwijzer en andere informatie voor maximaal 1.000 titels, albums of tekstbestanden.

### 1.14.2. Bladwijzers instellen.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u genummerde en spraakbladwijzers kunt instellen in uw titel of album.

**Tip:** De toets Bladwijzers is de toets links onder van de vier functietoetsen.

Voor meer informatie over bladwijzers in de huidige titel, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK weergeeft of niet:

- Druk één keer op cijfertoets 5, waarna de PLEXTALK een aantal taken zegt, zoals informatie over de genummerde bladwijzers en spraakbladwijzers in de huidige titel.
- Druk herhaaldelijk op cijfertoets 5 om de lijst met gesproken items snel te doorlopen.
- Druk op de toets Enter om de stem te stoppen als u de gewenste informatie heeft gehoord.

Als u een genummerde bladwijzer wenst in te stellen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet weergeeft:

- Druk twee keer op de toets Bladwijzer. De PLEXTALK zegt “Bladwijzer instellen”.
- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te stellen dat u aan deze bladwijzer wenst toe te kennen.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren “navigatie Op) om uw informatie te wissen.
- Als u het nummer van een bestaande bladwijzer ingeeft, biedt de PLEXTALK u de mogelijkheid de bestaande bladwijzer te overschrijven of een ander nummer toe te wijzen. Druk op de toets Enter om de bestaande bladwijzer te overschrijven, of druk op de toets Annuleren om een ander nummer toe te wijzen.
- Als u een geldig nummer voor uw bladwijzer heeft geselecteerd, bevestigt de PLEXTALK dat de bladwijzer werd ingesteld.

**Opmerking:** U kunt geen bladwijzer instellen in de positie van een bestaande bladwijzer.

Als u een spraakbladwijzer wenst in te stellen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt:

**Tip:** De toets Opname is de rode, ovale toets, net onder de luidspreker links op de PLEXTALK.

- Druk twee keer op de toets Bladwijzer. De PLEXTALK zegt “Bladwijzer instellen”.

- Gebruik de cijfertoetsen om het nummer in te stellen dat u aan deze spraakbladwijzer wenst toe te kennen.
- Druk één keer op de toets Opname om te bevestigen, of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u het nummer van een bestaande bladwijzer ingeeft, biedt de PLEXTALK u de mogelijkheid de bestaande bladwijzer te overschrijven of een ander nummer toe te wijzen. Druk op de toets Enter om de bestaande bladwijzer te overschrijven, of druk op de toets Annuleren om een ander nummer toe te wijzen.
- Als u een geldig nummer aan uw spraakbladwijzer heeft toegewezen, zegt de PLEXTALK dat u de toets Opname ingedrukt dient te houden tijdens de opname, en geeft hij aan dat het opnameniveau automatisch wordt ingesteld.
- Hou de toets Opname ingedrukt en spreek uw spraaknotitie in.
- Laat de toets Opname los als u klaar bent. De PLEXTALK bevestigt dat de spraakbladwijzer ingesteld is.

**Opmerking:** De ingebouwde microfoon bevindt zich onder de luidspreker bovenaan de PLEXTALK.

**Opmerking:** U kunt kiezen of spraakbladwijzers al dan niet worden weergegeven terwijl u naar de bladwijzer navigeert of terwijl u de titel of het album beluistert. Meer informatie hieromtrent vindt u aan het einde van dit hoofdstuk.

**Opmerking:** Herneembladwijzers worden automatisch door de PLEXTALK ingesteld als u naar een andere titel, een ander album of een ander bestand gaat, of als u de recorder uitschakelt. U hoeft zelf niets te doen.

### 1.14.3. Navigeren naar bladwijzers.

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u naar de verschillende soorten bladwijzers kunt navigeren.

Als u naar een genummerde bladwijzer wenst te gaan, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt:

- Druk één keer op de toets Bladwijzer. De PLEXTALK zegt “ga naar bladwijzer”.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer waarnaar u wenst te gaan.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u een geldig bladwijzernummer heeft ingevoerd, gaat de PLEXTALK naar de locatie van die bladwijzer en begint het afspelen automatisch.

**Opmerking:** De PLEXTALK laat een foutmelding horen als u naar een genummerde bladwijzer probeert te gaan die niet bestaat.

Als u naar een spraakbladwijzer wenst te gaan, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt:

- Druk één keer op de toets Bladwijzer. De PLEXTALK zegt “ga naar bladwijzer”.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de spraakbladwijzer waarnaar u wenst te gaan.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u een geldig bladwijzernummer heeft ingevoerd, gaat de PLEXTALK naar de locatie van die bladwijzer en begint het afspelen automatisch.
- Afhankelijk van de instelling die u voor het afspelen van spraakbladwijzers heeft gekozen, hoort u nu eventueel de spraaknotitie die u voordien heeft opgenomen.

**Opmerking:** De PLEXTALK laat een foutmelding horen als u naar een spraakbladwijzer probeert te gaan die niet bestaat.

Als u bladwijzers in een titel, een album of een bestand heeft ingesteld, vindt u in het navigatiemenu ook de optie “bladwijzer”. Als u naar de volgende bladwijzer met een kleiner of groter nummer wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie “bladwijzer” in het navigatiemenu te gaan.

- Druk op de toets Links om naar de volgende bladwijzer met een kleiner nummer te gaan. De PLEXTALK gaat naar de bladwijzer en zegt het nummer ervan. Het afspelen start automatisch. Als u bij de bladwijzer met het kleinste nummer bent gekomen, gaat u, wanneer u op de toets Links drukt, naar de bladwijzer met het grootste nummer.
- Druk op de toets Rechts om naar de volgende bladwijzer met een groter nummer te gaan. De PLEXTALK gaat naar de bladwijzer en zegt het nummer ervan. Het afspelen start automatisch. Als u bij de bladwijzer met het grootste nummer bent gekomen, gaat u, wanneer u op de toets Rechts drukt, naar de bladwijzer met het kleinste nummer.

**Opmerking:** Als u op deze manier navigeert, doorloopt u de bladwijzers in de volgorde waarin ze genummerd zijn, en niet in de chronologische volgorde waarin ze in de titel, het album of het bestand voorkomen. Voorbeeld: Stel dat u bladwijzers in willekeurige volgorde met de nummers 1 tot 10 aan uw titel, album of bestand heeft toegewezen en dat u zich momenteel bij bladwijzer 5 bevindt. Als u deze methode gebruikt, kunt u naar bladwijzer 4 of 6 gaan, ongeacht waar ze zich bevinden, zelfs als er andere bladwijzers tussen de nummers 4 en 5 of tussen 5 en 6 staan.

**Opmerking:** Als er geen bladwijzers in de titel voorkomen, maakt de optie “bladwijzer” geen deel uit van het navigatiemenu.

#### 1.14.4. Bladwijzers verwijderen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u bepaalde bladwijzers of alle bladwijzers in de huidige titel kunt verwijderen.

Om een genummerde bladwijzer of een spraakbladwijzer te verwijderen, verloopt de procedure identiek:

- Druk 3 keer op de toets Bladwijzer. De PLEXTALK zegt “bladwijzer verwijderen”.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de bladwijzer die u wenst te verwijderen.

- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u de actie bevestigt, verwijdert de PLEXTALK de bladwijzer in kwestie uit de huidige titel of uit het album, waarna dit wordt bevestigd met een gesproken bericht.

**Opmerking:** Als de bladwijzer die u hebt geselecteerd, een spraakbladwijzer is, wordt de bijbehorende spraaknotitie ook uit het interne geheugen verwijderd.

**Opmerking:** Als u een ongeldig bladwijzernummer ingeeft, geeft de PLEXTALK een gesproken foutmelding.

Als u alle bladwijzers in de huidige titel, het huidige album of het huidige bestand wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

**Tip:** De toets Menu is de toets rechts boven van de 4 functietoetsen.

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bladwijzer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “alle bladwijzers in huidige titel verwijderen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging. Als u wenst verder te gaan, drukt u op de toets Enter, waarna de PLEXTALK “verwijderd” zegt. Als u van gedacht verandert, drukt u op de toets Annuleren of op de toets Menu om het menusysteem volledig te verlaten.

**Opmerking:** Met deze procedure worden enkel de bladwijzers in de huidige titel, het huidige album of het huidige bestand verwijderd. Deze procedure heeft geen invloed op bladwijzers in andere titels of albums.

## 1.14.5. Stem voor spraakbladwijzers in- en uitschakelen.

Als u spraakbladwijzers gebruikt, kunt u bepalen of de bladwijzer tijdens het afspelen moet worden uitgesproken.

Spraakbladwijzers schakelt u als volgt in of uit:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bladwijzer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “afspeelinstelling voor spraakbladwijzers” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de optie “spraakbladwijzer aan” of “spraakbladwijzer uit” te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter.

**Opmerking:** De standaard fabrieksinstelling voor het afspelen van spraakbladwijzers is “spraakbladwijzer aan”.

## 1.15. Het ingebouwde helpbestand.

De PLEXTALK is voorzien van een ingebouwd helpsysteem, dat u op elk ogenblik kunt oproepen. Dit bestand is opgeslagen in het interne geheugen, zodat u het gemakkelijk kunt oproepen en het geen plaats op andere media inneemt. Het bestand bevat niet de volledige inhoud van de handleiding, maar de belangrijkste hoofdstukken die u nodig kunt hebben terwijl u uw PLEXTALK gebruikt. Het bestand is enkel gemaakt in het DAISY 3 tekstformaat en maakt gebruik van de ingebouwde synthetische stem.

### 1.15.1. Het ingebouwde helpbestand oproepen.

Ga als volgt te werk om het ingebouwde helpbestand op te roepen:

- Druk één keer op cijfertoets 0.



- De PLEXTALK laadt het helpbestand in de afspeelpositie waar u zich het laatst bevond.
- Navigeer in het bestand net zoals u in andere DAISY-tekstitels navigeert. Meer informatie over het navigeren in DAISY-titels vindt u in het volgende hoofdstuk.

U kunt het helpbestand als volgt verlaten:

- Druk één keer op cijfertoets 0 of druk op de toets Titel om naar één van de andere media te gaan.

### **1.15.2. Informatie in het helpbestand oproepen.**

Als u het helpbestand gebruikt om informatie op te roepen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet afspeelt:

- Druk één keer op cijfertoets 5.
- U hoort uiteenlopende informatie. Zie hierna voor meer details.
- Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met de toets Enter.

In het helpbestand hoort u de volgende items:

- Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau.
- Tijdinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd.
- Pagina-informatie.
- Kopinformatie.
- Bladwijzerinformatie.
- Titelinformatie - type.
- Media-informatie.
- Afspeelstand - herhalen of normaal.

## 2. DAISY-titels weergeven.

Dit hoofdstuk behandelt extra functies wanneer u een DAISY-titel beluistert. Voor u verdergaat met dit hoofdstuk is het aangewezen dat u een DAISY-titel ter beschikking heeft, zodat u de functies zelf kunt uitproberen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de handleiding gebruiken, want daar vindt u veel van de hier behandelde DAISY-functies.

**OPGELET:** De PLEXTALK is enkel compatibel met SD- of SDHC-kaarten. Als u een andere geheugenkaart zoals een memory stick of MMC gebruikt, veroorzaakt u een storing. Gebruik dergelijke media dus niet.

### 2.1. Kop-, pagina- en titelinformatie oproepen.

Als u een SD-kaart of een USB-medium gebruikt, kunt u informatie over de huidige titel als volgt opvragen, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet weergeeft:

- Druk één keer op cijfertoets 5.
- U hoort uiteenlopende informatie. Zie hierna voor meer details.
- Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met de toets Enter.

In een DAISY-audiotitel hoort u de volgende items:

- Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau.
- Tijdinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd.
- Pagina-informatie.
- Kopinformatie.
- Bladwijzerinformatie.
- Titelinformatie.

- Tijdstempelinformatie - opnamedatum.
- Media-informatie.
- Afspeelstand - herhalen of normaal.

Tijdens deze aankondigingen wordt de eerste zin van de huidige titel en het huidige hoofdstuk op het juiste tijdstip weergegeven, zodat u de titel en de locatie in de titel kunt identificeren.

**Opmerking:** Als de afspeelpositie zich aan het begin of het einde van de titel bevindt, hoort u geen opgenomen audio omdat er op die locaties geen audio is.

In een DAISY-tekstitel hoort u de volgende items:

- Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau.
- Pagina-informatie.
- Kopinformatie.
- Bladwijzerinformatie.
- Titelinformatie.
- Tijdstempelinformatie - opnamedatum.
- Media-informatie.
- Afspeelstand - herhalen of normaal.

**Opmerking:** Als er beginpagina's of speciale pagina's in de DAISY-titel voorkomen, hoort u het aantal beginpagina's en speciale pagina's alsook de andere pagina-informatie.

**Opmerking:** De PLEXTALK ondersteunt titels die over verschillende volumes lopen. Als er meer dan één volume werd gebruikt, hoort u het huidige volumenummer en het totale aantal volumes.

## 2.2. Kopnavigatie.

Er bestaan 2 manieren om naar koppen te navigeren in een DAISY-titel. U kunt rechtstreeks naar de koppen gaan of u kunt de beschikbare koppen één voor één doorlopen.

**Tip:** Koppen zijn gemarkeerde locaties in een DAISY-titel die u snel wenst op te roepen, zoals het begin van hoofdstukken, paragrafen en subparagrafen. De koppen in een DAISY-titel zijn doorlopend genummerd vanaf het begin van de titel. Elke titel heeft een bijbehorend navigatieniveau tussen niveau 1 en niveau 6.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde kop wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar. De begeleidingsstem zegt “ga naar kop”.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste kop.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u een geldig kopnummer heeft ingevoerd en op de toets Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar de geselecteerde kop en begint het afspelen automatisch. Als u een ongeldig kopnummer heeft ingevoerd, hoort u een gesproken foutmelding.

Om de koppen één voor één te doorlopen met behulp van de kopniveaus, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toets Op of Neer om naar het gewenste navigatieniveau te gaan, bijvoorbeeld niveau 1, niveau 2 enz.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige kop in het geselecteerde niveau. De PLEXTALK gaat naar de kop en het afspelen start automatisch. Als er geen vorige kop is, gaat de PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin titel”.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende kop in het geselecteerde niveau. De PLEXTALK gaat naar de kop en het afspelen start automatisch. Als er geen volgende kop is, gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u “Einde titel”.

**Opmerking:** Als u op deze manier navigeert, stopt de PLEXTALK bij alle koppen die hetzelfde of een hoger niveau hebben dan het niveau dat u hebt geselecteerd. Voorbeeld: als u op niveau 3 navigeert, vindt de PLEXTALK alle koppen van niveau 1, niveau 2 en niveau 3

terwijl u vooruit of achteruit gaat. Als u navigatie op niveau 1 heeft gekozen, vindt de PLEXTALK enkel de koppen van niveau 1.

### **2.3. Paginanavigatie.**

Navigeren naar pagina's lijkt sterk op kopnavigatie. U kunt rechtstreeks naar de pagina's gaan of u kunt de beschikbare pagina's één voor één doorlopen. Als u de PLEXTALK gebruikt, worden de pagina's vanaf het begin van de titel doorlopend genummerd.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde pagina wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste pagina.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u een geldig paginanummer heeft ingevoerd en op de toets Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar de door u geselecteerde pagina en start het afspelen automatisch. Als u een ongeldig paginanummer heeft ingevoerd, hoort u een gesproken foutmelding.

Als u de pagina's één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te werk:

- Ga met de toets Op of Neer naar de optie "pagina" in het navigatiemenu.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige pagina. De PLEXTALK keert terug naar de vorige paginamerker en het afspelen start automatisch. Als er geen vorige pagina is, gaat de PLEXTALK naar het begin en hoort u "begin titel".
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende pagina. De PLEXTALK gaat vooruit naar de volgende paginamerker en het afspelen start automatisch. Als er geen

volgende pagina is, gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u “Einde titel”.

**Opmerking:** Als er geen paginamerkers in de titel voorkomen, maakt de optie “pagina” geen deel uit van het navigatiemenu.

**Opmerking:** Er zijn drie soorten pagina’s: normale pagina’s, beginpagina’s en speciale pagina’s. Beginpagina’s zijn de pagina’s aan het begin van het boek voor de paginanummering van de eigenlijke tekst begint. Speciale pagina’s zijn pagina’s die niet aan het begin staan en het doorlopende nummeringsysteem niet volgen. U kunt niet rechtstreeks met de toets GaNaar naar beginpagina’s of speciale pagina’s gaan. U kunt enkel naar dergelijke pagina’s navigeren met de toetsen Links of Rechts nadat u de optie “pagina” in het navigatiemenu heeft geselecteerd.

## 2.4. Groepsnavigatie.

**Tip:** Bij de PLEXTALK is een groep een navigatiefunctie die door de persoon die de titel aanmaakt, kan worden toegewezen aan belangrijke items in een DAISY-titel. De groepsnavigatie staat los van andere navigatiefuncties zoals koppen en pagina’s.

In groepen kunt u slechts één voor één navigeren. De PLEXTALK gaat naar alle koppen en groepen.

Om één groep tegelijk vooruit of achteruit te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Ga met de toets Op of Neer naar de optie “groep” in het navigatiemenu.
- Gebruik de toets Links om achteruit te gaan naar het vorige groepsitem in de titel. De PLEXTALK keert terug naar het vorige groepsitem en het afspelen start automatisch. Als er geen vorige groepsitems zijn, gaat de PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin titel”.
- Gebruik de toets Rechts om vooruit te gaan naar het volgende groepsitem in de titel. De PLEXTALK gaat vooruit naar het volgende groepsitem en het afspelen start automatisch. Als er

geen volgende groepsitems zijn, gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u “einde titel”.

**Opmerking:** Als er geen groepmerkers in de titel voorkomen, maakt de optie “groep” geen deel uit van het navigatiemenu.

## 2.5. Zinnavigatie.

**Tip:** Zinnen zijn een DAISY-navigatiefunctie die automatisch wordt ingesteld tijdens de opname. Een zin is een stuk audio tussen twee stiltes.

- Om één zin terug te keren, drukt u op de toets Op of Neer om de optie “Zin” in het navigatiemenu te selecteren, waarna u één keer op de toets Links drukt. De PLEXTALK gaat achteruit naar het begin van de vorige zin, waarna het afspelen automatisch start. Als er geen vorige zin is, gaat de PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin titel”.
- Om één zin vooruit te gaan, drukt u op de toets Op of Neer om de optie “Zin” in het navigatiemenu te selecteren, waarna u één keer op de toets Rechts drukt. De PLEXTALK gaat vooruit naar het begin van de volgende zin, waarna het afspelen automatisch start. Als er geen volgende zin is, gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u “einde titel”.

**Opmerking:** Springen op basis van zinnen is enkel mogelijk als u een DAISY-titel beluistert.

**Opmerking:** Als u de zin relatief lang heeft beluisterd, dient u soms twee keer op de toets Terug te drukken om snel naar de vorige zin te gaan, anders springt de PLEXTALK slechts naar het begin van de huidige zin.

## 2.6. Een afspeelstand selecteren.

Als u een DAISY-titel gebruikt, kunt u kiezen uit 2 afspeelstanden. De mogelijke opties zijn:

- Standaardweergave - dit is de standaard fabrieksinstelling. Hiermee wordt de titel weergegeven en wordt aan het einde gestopt. De PLEXTALK zegt “einde titel”. Als u in dit geval op de toets Start/Stop drukt, start het afspelen opnieuw vanaf het begin.
- Titel herhalen - de huidige titel wordt continu weergegeven tot het afspelen wordt gestopt.

U kunt een afspeelstand als volgt selecteren:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “afspeelinstelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. U hoort de momenteel geselecteerde afspeelstand.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Uw keuze wordt uitgevoerd en het menusysteem wordt automatisch afgesloten.

**Opmerking:** Als u een afspeelstand selecteert, blijft dit de standaard afspeelstand tot u uw keuze wijzigt. De afspeelstand blijft dus ook behouden als u het toestel uitschakelt en weer inschakelt.

### 3. Audiobestanden of muziek-cd's weergeven.

Dit hoofdstuk behandelt functies die specifiek zijn voor het afspelen van audiobestanden of muziek-cd's. Deze commando's lijken sterk op de commando's voor DAISY-titels, zodat u ze snel kunt aanleren. Voor u verder gaat met dit hoofdstuk, moet er een SD-kaart of een USB-medium geplaatst zijn met audiobestanden in het juiste audioformaat, of moet er een muziek-cd in het externe USB cd/dvd-station zitten, zodat u de functies kunt uitproberen terwijl u leest.

**Tip:** In deze handleiding wordt met “audiobestanden” bestanden bedoeld die met een pc of IC-recorder werden gemaakt. Zoals reeds



gezegd kan de PLEXTALK audiobestanden herkennen en weergeven die in één van de volgende bestandsformaten gemaakt zijn: Wave, MP3 of AMR-WB+.

**OPGELET:** De PLEXTALK is enkel compatibel met SD- of SDHC-kaarten. Als u een andere geheugenkaart zoals een memory stick of MMC gebruikt, veroorzaakt u een storing. Gebruik dergelijke media dus niet.

**OPGELET:** De PLEXTALK kan een muziek-cd die niet compatibel is met de standaard CD Digital Audio “CD-DA”, eventueel niet weergeven. Bepaalde muziek-cd's met kopieerbeveiliging zijn niet compatibel met CD-DA, wat gevolgen kan hebben voor het afspelen ervan, zelfs op een cd-rom-gebaseerde speler zoals de PLEXTALK.

**Opmerking:** De PLEXTALK kan niet worden gebruikt om audiobestanden op SD-kaarten of USB-media op te nemen of te bewerken.

### 3.1. Meer informatie over audiobestanden.

Dit hoofdstuk geeft meer technische informatie over de soorten audiobestanden die u met uw PLEXTALK kunt gebruiken. De bestandstypes zijn:

- MP3-bestanden - MP3 “afkorting voor MPEG1/2 Audio Layer 3” is een standaard voor de comprimering van audiogegevens. Hiermee zijn compressieverhoudingen mogelijk van 1/10 of zelfs 1/12, met muziek-cd-kwaliteit. De PLEXTALK ondersteunt de volgende bitsnelheden: MPEG1 Layer 3 van 32kbps tot 320kbps en MPEG2 Layer 3 van 8kbps tot 160kbps. Ook VBR “Variable Bit Rate” wordt ondersteund.

**Opmerking:** Bij VBR is de aangegeven verstreken en resterende tijd niet nauwkeurig; deze informatie mag enkel als een schatting worden beschouwd.

**Opmerking:** De PLEXTALK ondersteunt het MPEG2.5 Audio Layer 3 bestandsformaat niet.

- WAVE-bestanden - Het Wave-formaat is het standaardformaat van Microsoft voor audiobestanden. De PLEXTALK ondersteunt Wave-bestanden enkel in PCM “Pulse Code Modulation” formaat.
- AMR-WB+ - Dit is een standaard voor de compressie van audiogegevens. De PLEXTALK ondersteunt alle bitsnelheden voor deze audiostandaard.

**Opmerking:** Voor meer informatie over dit formaat kunt u terecht op de volgende website: <http://www.voiceage.com/>.

### 3.2. Meer informatie over de afspeelvolgorde.

Dit hoofdstuk geeft informatie over de volgorde die wordt gebruikt tijdens het afspelen van bestanden en mappen.

- Weergave van bestanden - De PLEXTALK geeft de bestanden weer in de volgorde van hun bestandsnaam. In dit geval hebben cijfers voorrang op alfabetische tekens. Voorbeeld: als één bestand de naam “123ABC” heeft en een tweede bestand de naam “ABC”, wordt het bestand “123ABC” weergegeven voor het bestand “ABC”.
- Weergave van mappen - Als er meer dan één map op de SD-kaart of het USB-medium staat, worden de audiobestanden weergegeven in de volgorde van de mapnamen.

#### **Voorbeeld:**

Op het basisniveau hebben we map 1, map 4 en bestand A.

Onder map 1 hebben we map 2, map 3 en bestand B.

Onder map 2 hebben we bestand E en bestand F.

Onder map 3 hebben we bestand G en bestand H.

Onder map 4 hebben we bestand C en bestand D.

In dit voorbeeld is het afspelenvolgorde: A, B, E, F, G, H, C. D.

### 3.3. Beperkingen voor audiobestanden.

Als u een SD-kaart of USB-medium met audiobestanden maakt voor gebruik in uw PLEXTALK, dient u rekening te houden met de volgende beperkingen:

Beperking op het aantal bestanden en mappen:

- Het maximale aantal bestanden dat in een map kan worden opgeslagen, bedraagt 1024. Als er meer bestanden dan 1024 zijn, worden ze niet herkend.
- Het maximale aantal mappen bedraagt 1024, inclusief de hoofdmap. Als er meer mappen zijn dan 1024, worden ze niet herkend.
- De PLEXTALK beschouwt de bestandsmappen als albums en herkent maximaal 6 hiërarchieën.
- Als een map een DAISY-boek bevat, doorzoekt de PLEXTALK de inhoud onder de map niet.

**Opmerking:** Als er een groot aantal mappen zijn, heeft de PLEXTALK meer tijd nodig om de SD-kaart of de USB-informatie te lezen.

### 3.4. Bestands- en albuminformatie opvragen.

Als u een SD-kaart of een USB-medium gebruikt, kunt u informatie over het huidige bestand en album als volgt opvragen, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet weergeeft:

- Druk één keer op cijfertoets 5.
- U hoort uiteenlopende informatie. Zie hierna voor meer details.
- Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met de toets Enter.

In een audiobestand hoort u de volgende items:

- Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau.
- Tijdinformatie – verstreken tijd, resterende tijd en totale tijd.
- Spoorinformatie.
- Albuminformatie.
- Bladwijzerinformatie.
- Titelinformatie.
- Media-informatie.
- Afspeelstand - herhalen of normaal.

### **3.5. Spoor navigatie.**

Navigeren naar sporen lijkt sterk op kop- of paginanavigatie. U kunt rechtstreeks naar sporen gaan of u kunt de beschikbare sporen één voor één doorlopen. De sporen zijn doorlopend genummerd vanaf het begin van het album.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde spoor wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar. De begeleidingsstem zegt “ga naar spoor”.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van de gewenste spoor.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.
- Als u een geldig spoornummer heeft ingevoerd en op de toets Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar de geselecteerde spoor en start het afspelen automatisch. Als u een ongeldig spoornummer heeft ingevoerd, hoort u een gesproken foutmelding.

Als u de sporen één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toets Op of Neer om naar de optie “spoor” in het navigatiemenu te gaan.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar de vorige spoor. De PLEXTALK keert terug naar de vorige spoor en het afspelen start automatisch. Als er geen vorige spoor is, gaat de PLEXTALK naar het begin en hoort u “begin album”.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar de volgende spoor. De PLEXTALK gaat vooruit naar de volgende spoor en het afspelen start automatisch. Als er geen volgende spoor is, gaat de PLEXTALK naar het einde en hoort u “einde album”.

**Opmerking:** Als u één spoor tegelijk terugkeert en als u het spoor gedurende meer dan 3 seconden laat weergeven, gaat u naar het begin van de huidige spoor als u nogmaals een spoor terugkeert. Als u binnen de 3 seconden een tweede keer terugkeert, gaat u naar het vorige spoor.

**Opmerking:** Het hierboven beschreven navigatiegedrag is afhankelijk van het aantal albums en de momenteel geselecteerde afspeelstand. Voorbeeld: als u in de standaardmodus meer dan één album heeft, en als u de laatste spoor in het huidige album bereikt en u één spoor tegelijk vooruit gaat, gaat de PLEXTALK naar het eerste spoor in het volgende album in plaats van “einde album” te zeggen.

### 3.6. Albumnavigatie.

Het navigeren in albums lijkt sterk op spoornavigatie. U kunt rechtstreeks naar albums gaan of u kunt de beschikbare albums één voor één doorlopen.

Als u rechtstreeks naar een bepaald album wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk twee keer op de toets GaNaar. De begeleidingssysteem zegt “ga naar album”.
- Voer met de cijfertoetsen het nummer in van het gewenste album.
- Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om uw informatie te wissen.

- Als u een geldig albumnummer heeft ingevoerd en op de toets Enter heeft gedrukt, gaat de PLEXTALK naar het geselecteerde album en start het afspelen automatisch. Als u een ongeldig albumnummer heeft ingevoerd, hoort u een gesproken foutmelding.

Als u de albums één voor één wenst te doorlopen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de toets Op of Neer en selecteer “album” in het navigatiemenu.
- Druk op de toets Links om terug te keren naar het vorige album. De PLEXTALK keert terug naar het vorige album, zegt het albumnummer en start het afspelen automatisch.
- Druk op de toets Rechts om vooruit te gaan naar het volgende album. De PLEXTALK gaat vooruit naar het volgende album, zegt het albumnummer en start het afspelen automatisch.

### **3.7. Een afspeelstand selecteren.**

Net zoals bij een DAISY-titel kunt u, als u audiobestanden weergeeft, kiezen uit verschillende afspeelstanden. De mogelijke opties zijn:

- Standaardweergave - dit is de standaard fabrieksinstelling. Hiermee wordt het huidige album weergegeven en wordt aan het einde gestopt. De PLEXTALK zegt “einde album”. Als u in dit geval op de toets Start/Stop drukt, begint het afspelen opnieuw aan het begin van het album.
- Spoor herhalen - het huidige spoor wordt continu weergegeven tot het afspelen wordt gestopt.
- Album herhalen - het huidige album wordt continu weergegeven tot het afspelen wordt gestopt.
- Alle albums herhalen - alle albums worden één voor één herhaald tot het afspelen wordt gestopt.
- Willekeurig herhalen - de bestanden in alle albums worden continu in willekeurige volgorde weergegeven tot het afspelen wordt gestopt.

U kunt een afspeelstand als volgt selecteren:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “Playback Setting” “afspeel-instelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. U hoort de momenteel geselecteerde afspeelstand.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Uw keuze wordt uitgevoerd en het menusysteem wordt automatisch afgesloten.

**Opmerking:** Als u een afspeelstand selecteert, blijft dit de standaard afspeelstand voor audiobestanden tot u uw instelling wijzigt, zelfs als u het toestel uitschakelt en weer inschakelt.

## 4. Tekstbestanden weergeven.

**Tip:** In deze handleiding zijn tekstbestanden gewone tekstbestanden of HTML-bestanden. Bij tekstbestanden hoort geen vooropgenomen audio, zodat de PLEXTALK automatisch de ingebouwde tekst-naar-spraak omzetter gebruikt om deze bestanden weer te geven.

Het weergeven van een tekstbestand met PLEXTALK lijkt sterk op het weergeven van een DAISY-titel. In dit hoofdstuk wordt gewezen op een aantal belangrijke verschillen.

### 4.1. Informatie over het tekstbestand opvragen.

Als u een SD-kaart of een USB-medium gebruikt, kunt u informatie over het huidige tekstbestand als volgt opvragen, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet weergeeft:

- Druk één keer op cijfertoets 5.
- U hoort uiteenlopende informatie. Zie hierna voor meer details.
- Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met de toets Enter.

Als u een tekstbestand gebruikt, hoort u de volgende items:

- Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau.
- Huidige positie - uitgedrukt als een percentage.
- Bladwijzerinformatie.
- Titelinformatie.
- Tijdstempel - datum en tijd waarop het bestand werd gemaakt.
- Media-informatie.
- Afspeelstand - herhalen of normaal.

## 4.2 Verschillen tussen gewone tekstbestanden en HTML-bestanden.

Hoewel deze handleiding gewone tekstbestanden en HTML-bestanden als “tekstbestanden” beschouwt, dient u toch op het volgende verschil tussen deze twee soorten bestanden te letten, want dit heeft gevolgen voor de beschikbare navigatieopties.

Gewone tekstbestanden hebben een structuur die bestaat uit paragrafen, zinnen, woorden en tekens. Er is geen bijkomende structuur zoals koppen. HTML-bestanden bestaan uit paragrafen, zinnen, woorden en tekens, maar eventueel ook uit kopinformatie, als deze informatie in het oorspronkelijke HTML-document werd gecodeerd. Als het HTML-bestand koppen heeft, kunt u deze gebruiken om de navigatie in deze bestanden te vergemakkelijken.

**Opmerking:** Als het HTML-bestand koppen op verschillende niveaus bevat, beschikt u slechts over één niveau voor de kopnavigatie. Met



andere woorden: alle koppen in een HTML-bestand worden beschouwd als koppen op niveau 1.

### **4.3. Navigeren op percentage.**

In tekstbestanden kunt u niet rechtstreeks naar koppen, pagina's of groepen navigeren. Deze opties zijn dus ook niet beschikbaar als u op de toets GaNaar drukt. Met de PLEXTALK kunt u echter wel navigeren op basis van het percentage van het bestand dat reeds werd weergegeven.

Om op basis van het percentage te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar.
- Typ een percentage tussen 0% en 100% en druk op de toets Enter.
- De PLEXTALK verplaatst de afspeelpositie naar die positie in het tekstbestand.
- Als u per vergissing een waarde van meer dan 100% ingeeft, gaat de PLEXTALK naar het einde van het tekstbestand.

### **4.4. Navigeren op basis van paragraaf, zin, woord of teken.**

Zoals reeds gezegd kunt u in een tekstbestand op vier manieren navigeren: "Alinea", "Regel", "woord" en "Karakter". Deze opties verschijnen automatisch in het navigatiemenu als u dit soort bestanden oproept.

De navigatie verloopt identiek voor al deze opties:

- Gebruik de toetsen Op of Neer om de gewenste navigatiemethode te selecteren: alinea, regel, woord of karakter.

- Gebruik de toets Links om met de geselecteerde eenheid terug te keren in het bestand. Als u het begin van het bestand bereikt, hoort u “begin titel”.
- Gebruik de toets Rechts om met de geselecteerde eenheid vooruit te gaan in het bestand. Als u het einde van het bestand bereikt, hoort u “Einde titel”.

#### **4.5. Navigeren op basis van het niveau “enkel HTML-bestanden”.**

Voor HTML-bestanden die met koppen gecodeerd zijn, heeft u een bijkomende navigatieoptie in het navigatiemenu. Deze optie wordt “niveau” genoemd. Deze navigatiewijze is verschillend van navigeren in een DAISY-titel, want alle koppen worden, ongeacht hun niveau, via één element in het navigatiemenu opgeroepen. Voorbeeld: als een HTML-bestand koppen op niveau 1, niveau 2 en niveau 3 bevat, is er slechts één optie in het navigatiemenu met de naam “niveau”. U kunt niet navigeren op basis van een specifiek niveau.

Om op basis van het niveau te navigeren, gaat u als volgt te werk:

- Gebruik de toetsen Op of Neer om naar de optie “niveau” in het navigatiemenu te gaan.
- Gebruik de toets Links om in het bestand terug te keren naar de vorige kop. Als u het begin van het bestand bereikt, hoort u “begin titel”.
- Gebruik de toets Rechts om in het bestand vooruit te gaan naar de volgende kop. Als u het einde van het bestand bereikt, hoort u “Einde titel”.

#### **4.6. Een afspeelstand selecteren.**

Net zoals bij DAISY-titels en audiobestanden kunt u, als u tekstbestanden weergeeft, de gewenste afspeelstand instellen. De mogelijke opties zijn:

- Standaardweergave - dit is de standaard fabrieksinstelling. Hiermee wordt de titel weergegeven en wordt aan het einde gestopt. De PLEXTALK zegt “Einde titel”. Als u in dit geval op de toets Start/Stop drukt, start het afspelen opnieuw vanaf het begin.
- Titel herhalen - de huidige titel wordt continu weergegeven tot het afspelen wordt gestopt.

U kunt een afspeelstand als volgt selecteren:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de “afspeelinstelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter. U hoort de momenteel geselecteerde afspeelstand.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste afspeelstand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Uw keuze wordt uitgevoerd en het menusysteem wordt automatisch afgesloten.

**Opmerking:** Als u een afspeelstand selecteert, blijft dit de standaard afspeelstand tot u uw keuze wijzigt. De afspeelstand blijft dus ook behouden als u het toestel uitschakelt en weer inschakelt.

## 5. Algemene informatie over opnamen.

Met de PLEXTALK kunt u live opnemen tijdens lessen of conferenties. U kunt ook opnemen van andere media zoals cassettes, cd's, televisie of radio. In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over opnametoestellen, media, praktische opnametips, opnamestanden en geluidskwaliteit. Functies die betrekking hebben op het opnemen en bewerken van een DAISY-titel op uw PLEXTALK, worden in het volgende hoofdstuk beschreven.

Voor u met een opname begint, dient u alle vereiste opnameapparatuur ter beschikking te hebben en dient u de gewenste ingangsbron te kiezen. Met de PLEXTALK kunt u kiezen uit de

ingebouwde microfoon, of de gecombineerde ingang voor externe microfoon en lijnsignaal.

## 5.1. Opnameapparatuur.

Uw PLEXTALK wordt geleverd met de basiscomponenten die u nodig heeft voor een eerste spraakopname. U kunt echter ook bijkomende accessoires aanschaffen om de kwaliteit van uw opnamen te verbeteren en van externe bronnen te kunnen opnemen, zoals bandopnemers, cd-spelers, radio's en dergelijke toestellen.

De basiscomponenten die u nodig heeft of eventueel kunt aanschaffen zijn:

- SD-kaart - Een SD-kaart van 2GB wordt als accessoire geleverd. U kunt informatie op een SD-kaart opnemen en bewerken. Op een SD-kaart kunt u ook een reservekopie maken van uw USB-inhoud.

**Opmerking:** De specificaties van de bijgeleverde kaart kunnen verschillend zijn van de waarden die in de handleiding vermeld zijn.

- Externe microfoon “optioneel” - Dynamische microfoons en “plug-in power” stereomicrofoons kunnen worden gebruikt. Selecteer een geschikte microfoon met een mini-jackaansluiting van 3,5 mm diameter.

**OPGELET:** Als u een condensatormicrofoon gebruikt, moet deze “plug-in power” compatibel zijn en moet hij op de juiste manier worden gebruikt, anders kan hij beschadigd raken. Lees de handleiding bij de microfoon aandachtig voor u hem gebruikt.

- Audiokabel “optioneel” - Als het andere toestel een geschikte aansluiting heeft, kunt u een audiokabel met stereo mini-jackstekkers van 3,5 mm diameter gebruiken om rechtstreeks op te nemen van een cassetterecorder, cd-speler, radio of gelijkaardig toestel. U kunt natuurlijk het geluid via de luidsprekers van die toestellen opnemen, maar de

geluidskwaliteit zal niet goed zijn en u neemt bovendien andere achtergrondgeluiden op. Als u een audiokabel gebruikt, heeft u veel minder last van dergelijke storingen.

- Hoofdtelefoon - Een stereohoofdtelefoon met een stereo mini-jackstekker van 3,5 mm diameter is bijgeleverd. Als u een stereohoofdtelefoon gebruikt, kunt u audiobestanden en opgenomen materiaal in stereo beluisteren op uw PLEXTALK. Bovendien kunt u tijdens de opname een hoofdtelefoon gebruiken om het ingangsniveau te controleren.

## 5.2. Opnamemedia.

Met de PLEXTALK kunt u enkel opnemen op een SD-kaart of in het interne geheugen. Het interne geheugen wordt gebruikt als u een spraakmemo of een spraakbladwijzer opneemt. Dit hoofdstuk beschrijft een aantal zaken waarmee u rekening dient te houden voor u op een SD-kaart opneemt.

- Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart gebruiken om DAISY-titels op te nemen en te bewerken. U kunt een SD-kaart een onbeperkt aantal keren wissen en er opnieuw op opnemen.
- De PLEXTALK is geschikt voor SD-kaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Voor u een extra SD-kaart voor de PLEXTALK koopt, dient u na te gaan of die kaart compatibel is. Voor meer advies kunt u contact opnemen met uw PLEXTALK-verkoper.
- U kunt een SD-kaart in de PLEXTALK zelf wissen of in een pc als u over een geschikte kaartlezer beschikt.

**OPGELET:** Als u een SD-kaart op de pc wist, dient u in elk geval “FAT-16” of “FAT-32” te selecteren.

**Opmerking:** De PLEXTALK kan enkel opnemen op een SD-kaart; rechtstreeks opnemen op een USB-medium is niet mogelijk.

## 5.3. Algemene opnametips.

De kwaliteit van uw opname wordt door diverse factoren beïnvloed. In dit hoofdstuk vindt u enkele algemene tips om degelijke opnamen te realiseren met uw PLEXTALK. Hou zoveel mogelijk rekening met het volgende:

- Als u een spraakopname maakt, kiest u best een plaats waar er zo weinig mogelijk achtergrondlawaai is.
- Als u gedrukt materiaal voorleest, dient u de opname te pauzeren als u de pagina opslaat.
- Vermijd storende geluiden, zoals een sluitende deur, nippen aan drankjes, voorbijrijdende treinen, overvliegende vliegtuigen, enz.
- Kies een opnameomgeving met weinig harde oppervlakken, want ze kunnen galm in uw opname veroorzaken. Op een tafel of tegen de muur kunt u bijvoorbeeld gordijnen plaatsen. Het is ook handig als u de gordijnen sluit.
- Als u de ingebouwde microfoon gebruikt, mag u de PLEXTALK niet vasthouden, want de bewegingen van uw hand kunnen de opname verstoren.
- Als u een externe microfoon gebruikt, mag u de microfoon niet nodeloos hanteren, want uw handbewegingen worden gedetecteerd. Gebruik een microfoonvoet of plaats de microfoon op een zacht ondergrond, zoals een doek of een kussen.
- Als u een externe microfoon gebruikt, dient u de microfoon op een veilige afstand van de PLEXTALK te houden om echo's te voorkomen.
- Spreek niet te dicht bij de microfoon, want dit kan vervorming veroorzaken.
- Maak indien mogelijk eerst een testopname en controleer het resultaat.

#### **5.4. Opnamestanden en geluidskwaliteit.**

Op de PLEXTALK kunt u kiezen uit 6 opnamestanden. Deze 6 standen zijn:

- “Standaard” - voor algemene opnamen en spraakopnamen als er relatief weinig achtergrondlawaai is.
- “Conferentie” - voor opnamesituaties zoals conferenties, lezingen en klaslokalen, waar er veel achtergrondlawaai is.
- “Audio” - om op te nemen van audiotoeestellen zoals cd-spelers.
- “Analoge cassette” - om op te nemen van analoge cassettes.
- “Radio” - om radio-uitzendingen op te nemen.
- “Aangepast” - als u met de hierboven vermelde opties niet het gewenste resultaat krijgt, kunt u in deze opnamestand alle parameters handmatig aanpassen.

Dankzij deze opnamestanden kunt u uw PLEXTALK snel instellen voor uiteenlopende opnameomgevingen. Als de instellingen in de voorgeprogrammeerde opties echter niet geschikt zijn voor uw opname, kunt u de stand “aangepast” gebruiken en de instellingen zelf aanpassen.

Bovendien kunt u voor elke opnamestand kiezen uit een aantal instellingen voor de geluidskwaliteit. Met een hoge kwaliteitsinstelling vermindert de beschikbare opnametijd op de SD-kaart. Met een lage geluidskwaliteit kunt u langer opnemen, maar de audiokwaliteit is minder goed.

De beschikbare instellingen voor de geluidskwaliteit zijn:

- PCM 44,1kHz stereo
- PCM 22,05kHz mono
- MP3 256kbps 44,1kHz stereo
- MP3 128kbps 44,1kHz stereo
- MP3 64kbps 44,1kHz mono
- MP3 32kbps 22,05kHz mono

## **5.5. Technische informatie over opnamestanden en geluidskwaliteiten.**

In dit hoofdstuk vindt u aanvullende informatie over de beschikbare opnamestanden en de instellingen voor de geluidskwaliteit. Hier worden de parameters beschreven die voor elke opnamestand worden gebruikt en krijgt u een overzicht van de beschikbare opnametijd voor elke instelling van de geluidskwaliteit.

### **5.5.1. Instellingen voor de opnamestand.**

Elke opnamestand heeft voorgeprogrammeerde instellingen voor de volgende 4 parameters:

- “Automatische sectie-instelling” - De PLEXTALK kan in een DAISY-opname automatisch een nieuwe sectie maken na een bepaalde tijd zonder audio-ingangssignaal, bijvoorbeeld 2 seconden. Gebruik de instelling “geen instelling” om een continue opname zonder nieuwe secties te maken.
- “Bepaal wanneer de opname automatisch gestopt wordt wanneer er geen geluid is.” - Dit is de tijd gedurende dewelke de PLEXTALK de opname verderzet als er geen audio-ingangssignaal is. Daarna stopt de opname automatisch.
- “Druk de opname toets om het opnemen te starten” - De opname kan worden gestart als u op de toets Opname drukt of als een audio-ingangssignaal wordt gedetecteerd.
- “Selecteer achtergrondruisniveau van inputgeluid” - Als u opneemt in een omgeving met weinig lawaai, zoals een studio, gebruikt u de stand “laag”. Als u opneemt in een omgeving met veel lawaai, zoals een conferentie of een lezing, gebruikt u de instelling “hoog”.

### **5.5.2. Instellingen voor voorgeprogrammeerde opnamestanden.**

De voorgeprogrammeerde parameters voor de 5 opnamestanden zijn:

**“Standaard”:**



- “Selecteer automatische instelling van secties ”: “geen instelling”
- “Tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”: “geen instelling”
- “Trigger om opname te starten”: “als u op de toets Opname drukt”
- “Achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”: “normaal” “-28dB”

#### **“conferentie”:**

- “Automatische sectie-instelling”: “geen instelling”
- “Tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”: “geen instelling”
- “Trigger om opname te starten” : “als u op de toets Opname drukt”
- “Achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”: “hoog” “-20 dB”

#### **“audio”:**

- “Automatische sectie-instelling”: “2 seconden”
- “Tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”: “1 minuut”
- “Trigger om opname te starten” : “als op de opnametoets wordt gedrukt”
- “Achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”: “laag” “-40 dB”

#### **“analoge cassette”:**

- “automatische sectie-instelling”: “2 seconden”
- “tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”: “1 minuut”
- “trigger om opname te starten” : “als het geluid wordt gedetecteerd”
- “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”: “normaal” “-28 dB”

#### **“radio”:**

- “automatische sectie-instelling”: “geen instelling”

- “tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is”: “1 minuut”
- “trigger om opname te starten” : “als het geluid wordt gedetecteerd”
- “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”: “normaal” “-28 dB”

### 5.5.3. Beschikbare instellingen voor de stand “aangepast”

In de stand “aangepast” kunt u elke parameter instellen op de hierna beschreven instellingen:

- “automatische sectie-instelling” kan worden ingesteld op: “uit”, “1 seconde”, “2 seconden”, “3 seconden”, “4 seconden” of “5 seconden”.
- “tijd om opname automatisch te stoppen als er geen geluid is” kan worden ingesteld op: “uit”, “30 seconden”, “1 minuut”, “2 minuten”, “3 minuten” “4 minuten” of “5 minuten”.
- “trigger om opname te starten” kan worden ingesteld op “als op opnametoets wordt gedrukt” of “als geluid wordt gedetecteerd”.
- “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal” kan worden ingesteld op: “laag” “-40 dB”, “normaal” “-28 dB” of “hoog” “-20 dB”.

**Opmerking:** De instellingen voor de standen “standaard”, “conferentie”, “audio”, “analoge cassette” en “radio” kunnen niet worden gewijzigd. De instellingen voor de stand “aangepast” kunt u wel aanpassen.

**Opmerking:** Als u opneemt met de ingebouwde microfoon, wordt de instelling “achtergrondlawaai” automatisch ingesteld op “hoog”.

## 5.5.4. Beschikbare opnametijd voor de diverse geluidskwaliteiten.

De beschikbare opnametijd is afhankelijk van de door u gekozen instelling voor de geluidskwaliteit. Hoe hoger de geluidskwaliteit, hoe minder opnametijd er beschikbaar is. Hierna vindt u de opnametijd bij benadering voor 4 soorten media.

### **PCM 44,1kHz stereo:**

- SD-kaart, 1GB: 90 minuten
- SD-kaart, 2GB: 3 uur
- SD-kaart, 4GB: 6 uur
- SD-kaart, 8GB: 12 uur

### **PCM 22,05kHz mono:**

- SD-kaart, 1GB: 6 uur
- SD-kaart, 2GB: 12 uur
- SD-kaart, 4GB: 24 uur
- SD-kaart, 8GB: 48 uur

### **MP3 256 k stereo:**

- SD-kaart, 1GB: 7,5 uur
- SD-kaart, 2GB: 15 uur
- SD-kaart, 4GB: 30 uur
- SD-kaart, 8GB: 60 uur

### **MP3 128 k stereo:**

- SD-kaart, 1GB: 15 uur
- SD-kaart, 2GB: 30 uur
- SD-kaart, 4GB: 60 uur
- SD-kaart, 8GB: 120 uur

### **MP3 64 k mono:**

- SD-kaart, 1GB: 30 uur
- SD-kaart, 2GB: 60 uur
- SD-kaart, 4GB: 120 uur
- SD-kaart, 8GB: 240 uur

### **MP3 32 k mono:**

- SD-kaart, 1GB: 60 uur
- SD-kaart, 2GB: 120 uur
- SD-kaart, 4GB: 240 uur
- SD-kaart, 8GB: 480 uur

**Opmerking:** Deze opnametijden gelden slechts bij benadering en zijn afhankelijk van het aantal koppen en andere structuur in de opname.

## **6. Een DAISY-titel opnemen en bewerken.**

In het vorige hoofdstuk hebben we enkele algemene zaken in verband met opnamen op de PLEXTALK besproken. In dit hoofdstuk bekijken we meer in detail hoe u een opname maakt, de opname bewerkt en de titel voorbereidt voor gebruik in andere toestellen. Als u hoofdstuk 5 nog niet heeft gelezen, is het aan te bevelen dat u dit eerst doet.

### **6.1. Basisinformatie voor opnamen met de PLEXTALK.**

Voor u opneemt met de PLEXTALK, dient u goed vertrouwd te zijn met een aantal belangrijke zaken, die hierna worden behandeld.

- De PLEXTALK kan enkel opnemen op een SD-kaart of in zijn interne geheugen. Het interne geheugen wordt enkel gebruikt om spraakmemo's of spraakbladwijzers op te nemen.
- De PLEXTALK kan niet rechtstreeks opnemen op USB-media.
- Als u opneemt op een SD-kaart of in het interne geheugen, voert de PLEXTALK de opname altijd uit in het DAISY-formaat.
- U kunt koppen enkel instellen en verwijderen als u opneemt op een SD-kaart. U kunt geen koppen gebruiken in de functie Spraakmemo.
- Als u opneemt op een SD-kaart, wordt automatisch een nieuwe sectie gemaakt aan het einde van de huidige DAISY-titel telkens wanneer u een opname start. Voor u uw opname

start, hoeft u de afspeellocatie niet naar het einde van de titel te verplaatsen.

## **6.2. Opnametoestanden.**

De PLEXTALK beschikt over 3 opnametoestanden. Dit zijn “opname stand-by”, en “opname”.

- In opname stand-by kunt u het opnameniveau aanpassen en een opnamestand en instelling voor de geluidskwaliteit selecteren. Er wordt nog geen opname gemaakt. De stroomindicator knippert constant aan en uit in oranje.
- In opnamepauze kunt u het opnameniveau aanpassen, maar u kunt de opnamestand of de instelling voor de geluidskwaliteit niet wijzigen. Ook nu wordt er wordt nog geen opname gemaakt. De stroomindicator knippert constant aan en uit in oranje.
- Tijdens opname wordt het audio-ingangssignaal opgenomen op de SD-kaart. U kunt het opnameniveau aanpassen, maar u kunt de opnamestand of de instelling voor de geluidskwaliteit niet wijzigen. De stroomindicator brandt constant oranje.

## **6.3. Een lege SD-kaart plaatsen.**

Om de diverse functies in dit hoofdstuk uit te proberen, dient u een SD-kaart in de PLEXTALK te plaatsen. Als u uw testopnamen wenst te wissen als u klaar bent, gebruikt u best de SD-kaart die bij de PLEXTALK werd geleverd, want deze SD-kaart is leeg als u het toestel aankoopt. Op die manier voorkomt u dat u belangrijke gegevens op een andere SD-kaart wist.

Eerder in deze handleiding werd reeds algemeen beschreven hoe u een SD-kaart plaatst en uitwerpt. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de PLEXTALK zich gedraagt als u een lege SD-kaart plaatst die klaar is voor opname.

Als er geen SD-kaart in de PLEXTALK zit en als er geen externe bron aangesloten is op de microfoon- of lijningang, gedraagt de PLEXTALK zich als volgt:

- De PLEXTALK zegt “Geen inhoud op de SD-kaart. Titel bestaat niet. Selecteer een andere titel”.
- U kunt nu met de ingebouwde microfoon opnemen op de SD-kaart.
- U kunt ook met de toets Titel omschakelen naar het USB-medium of de functie Spraakmemo.

## **6.4. Fundamentele opnametechniek.**

Voor u de individuele functies meer in detail bekijkt, geven we een overzicht van het opnameproces als u een DAISY-titel op een SD-kaart maakt. Dit hoofdstuk beschrijft de normale procedure om een opname te maken.

Een opname op de PLEXTALK verloopt als volgt:

- Plaats de SD-kaart waarop u wenst op te nemen en ga na of de SD-kaart niet vergrendeld is.
- Sluit de gewenste apparatuur aan en selecteer de gewenste ingangsbron.
- Selecteer de opnamestand en de geluidskwaliteit “u kunt dit doen voor of na het omschakelen naar opname stand-by”.
- Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- Selecteer een titel waarin u wenst op te nemen.
- Stel het opnameniveau handmatig in of gebruik de AGC “automatische volume controle”.
- Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te starten.
- Druk nogmaals op de toets Opname om de opname te pauzeren.
- Druk op de toets Opname om de opname opnieuw te starten.
- Druk op de toets Start/Stop om de opname te stoppen.

**Opmerking:** U kunt de opname een onbeperkt aantal keer pauzeren. Telkens u de toets Opname voor de tweede keer indrukt, pauzeert de PLEXTALK de opname. Elke andere keer dat u de toets Opname indrukt, start de PLEXTALK de opname opnieuw.

**Opmerking:** Als u een nieuwe opname start, wordt automatisch een nieuwe sectie in de geselecteerde titel gemaakt. De audio wordt toegevoegd aan het einde van eventueel bestaande audio. U hoeft niet naar het einde te navigeren voor u de opname maakt.

## 6.5. De begeleidingssysteem uitschakelen tijdens de opname.

Voor opnamen van optimale kwaliteit is het aan te bevelen dat u de interne begeleidingssysteem uitschakelt als u een opname maakt via de ingebouwde microfoon of via een externe microfoon. Anders hoort u de begeleidingssysteem in uw opname. U kunt de begeleidingssysteem op 3 manieren uitschakelen:

- Zet het begeleidingsvolume op nul - deze optie is aangewezen voor personen die de opnamestatusindicator kunnen zien; deze optie is echter moeilijker voor blinde gebruikers die de begeleidingssysteem nodig hebben om te weten of de PLEXTALK opneemt of in pauze staat.
- Sluit een hoofdtelefoon aan - alle uitgangssignalen van de PLEXTALK worden weergegeven via de hoofdtelefoon, zodat de begeleidingssysteem niet wordt opgenomen. Deze methode is aangewezen voor alle gebruikers, maar u hebt dan wel een hoofdtelefoon nodig.
- Schakel de begeleidingssysteem uit tijdens de opname - op de PLEXTALK kunt u de begeleidingssysteem automatisch uitschakelen als u de opname start. Terwijl u opneemt, hoort u geen begeleidingssysteem. De begeleidingssysteem keer automatisch terug als u de opname pauzeert of stopt.

De begeleidingssysteem kan tijdens de opname als volgt worden in- of uitgeschakeld:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “begeleidingsstem in- of uitschakelen tijdens opname” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om “begeleiding uit” te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter. Het menusysteem wordt automatisch beëindigd.

**Opmerking:** De door u uitgevoerde selectie blijft de standaardinstelling tot u de instelling weer wijzigt. De standaardinstelling is “begeleiding aan”.

## 6.6. Een ingangsbron aansluiten en selecteren.

**Tip:** Bovenaan het toestel vindt u aansluitingen voor een hoofdtelefoon en een gecombineerde ingang voor een externe microfoon en een lijnsignaal. De aansluiting bovenaan in het midden is de aansluiting voor de hoofdtelefoon, terwijl de aansluiting links bedoeld is voor een externe microfoon of als lijningang.

De PLEXTALK gebruikt standaard de ingebouwde microfoon als er geen andere geluidsbron aangesloten is. Als u deze microfoon wenst te gebruiken, hoeft u niets speciaals te doen, behalve ervoor zorgen dat er niets aangesloten is op de gecombineerde ingang voor externe microfoon en lijnsignaal.

Als u live-opnamen maakt van stemmen, conferenties, lezingen, presentaties en concerten, krijgt u een betere kwaliteit als u een externe microfoon aansluit. Om op te nemen van andere toestellen, zoals een bandopnamer, een muziek-cd-speler of radio, sluit u het toestel in kwestie met behulp van een geschikte audiokabel aan op de ingang externe microfoon/lijnsignaal van de PLEXTALK.



Om een externe microfoon of een audiokabel aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:

- Steek de stekker van de microfoon of van de audiokabel in de gecombineerde ingang externe microfoon/lijsignaal.
- De PLEXTALK bevestigt deze aansluiting en zegt “microfoonstand” of “Line in modus”. Dit betekent ook dat de PLEXTALK deze ingang automatisch gebruikt voor de opname.
- Als de PLEXTALK “microfoonstand” zegt, betekent dit dat de instelling “externe audio-ingang schakelen” ingesteld is voor een microfoon.
- Als de PLEXTALK zegt “Line in modus”, betekent dit dat de instelling ingesteld is voor een line-in signaal.
- Als u een microfoon heeft aangesloten en de PLEXTALK zegt “Line in modus”, of als u een audiokabel heeft aangesloten en de PLEXTALK zegt “microfoonstand”, dient u de instelling in het menu te wijzigen. Later in dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u dit doet.

**Opmerking:** De PLEXTALK weet niet of u een microfoon of een audiokabel heeft aangesloten. De stem die u hoort, geeft enkel aan hoe de instelling “externe audio-ingang schakelen” momenteel ingesteld is.

Om de instelling voor de externe ingangsbron te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “externe audio-ingang schakelen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om “microfoonstand” of “Line in modus” te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter. Het menusysteem wordt automatisch beëindigd.

**OPGELET:** Als u de uitgang van een cd-speler verbindt met de lijn-in van de PLEXTALK, kan de opname soms vervormd zijn, zelfs als u het opnameniveau aanpast. In dit geval dient u de hoofdtelefoonuitgang van de cd-speler te verbinden met de lijningang van de PLEXTALK, waarna u de volumeregeling voor de hoofdtelefoon op de cd-speler gebruikt om het opnameniveau aan te passen.

## **6.7. Een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit selecteren.**

Voor DAISY-opnamen gebeurt de selectie van de opnamestand en van de geluidskwaliteit tijdens dezelfde procedure. Dit kan op twee manieren gebeuren. U kunt een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit selecteren voor of na het omschakelen naar opname stand-by. Beide methoden worden hierna beschreven, hoewel ze zeer gelijklopend zijn.

### **6.7.1. Een voorgeprogrammeerde opnamestand selecteren.**

Als u een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit wenst te kiezen voor u naar opname stand-by gaat, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “selectie opnamestand” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste stand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling voor de geluidskwaliteit te selecteren.

- Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets Enter. De PLEXTALK bevestigt dat uw selectie ingesteld is.

Als u een opnamestand en een instelling voor de geluidskwaliteit wenst te kiezen na het omschakelen naar opname stand-by, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Opname, waarna de PLEXTALK naar opname stand-by gaat.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “selectie opnamestand” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste stand te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling voor de geluidskwaliteit te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets Enter. De PLEXTALK bevestigt dat uw selectie ingesteld is.
- Als u uw selectie heeft gemaakt, keert u terug naar opname stand-by.

**Opmerking:** In beide situaties blijft de door u geselecteerde optie de standaardinstelling tot u die later weer wijzigt. De standaardfabrieksinstellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde opnamestand.

### **6.7.2. De opnamestand “aangepast” selecteren.**

Als u de opnamestand “aangepast” selecteert, dient u de instellingen te bepalen voor elk van de 5 opnameparameters. Bij de voorgeprogrammeerde opnamestanden is dit niet nodig.

U kunt de opnamestand “aangepast” als volgt instellen:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-instelling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter “dit is niet nodig als u deze procedure heeft gestart vanuit opname stand-by”.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de “selectie opnamestand” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “aangepast” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK biedt dan de mogelijkheid om een instelling voor de geluidskwaliteit te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de beschikbare opties te doorlopen, waarna u de gewenste optie selecteert met de toets Enter.
- U kunt nu uw voorkeuringstelling voor de vier resterende opnameparameters één voor één instellen.
- De PLEXTALK zegt de naam van de parameter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de gewenste optie te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK zegt daarna de naam van de volgende parameter.
- Herhaal deze procedure tot u een instelling heeft geselecteerd voor de parameter “achtergrondlawaai van geluidsingangssignaal”.
- Als u deze laatste selectie heeft gemaakt, bevestigt de PLEXTALK dat de instellingen ingesteld zijn. Daarna wordt het menusysteem verlaten en keert u terug naar de toestand waarin u de procedure heeft gestart.

**Opmerking:** Net zoals bij de voorgeprogrammeerde opnamestanden kunt u de opnamestand “aangepast” selecteren voor of na het omschakelen naar opname stand-by.

**Opmerking:** De stand “aangepast” blijft de standaard opnamestand tot u deze weer wijzigt.

## 6.8. De titel selecteren waarin u wenst op te nemen.

Voor u de opname start, dient u na te gaan of uw nieuwe opname in de juiste DAISY-titel wordt uitgevoerd. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een opname in een bestaande titel of in een nieuwe titel kunt maken.

Als u in een bestaande DAISY-titel wenst op te nemen, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer naar een bestaande DAISY-titel op de SD-kaart, zoals we reeds hebben gezien, en pauzeer het afspelen.
- Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan. U kunt de titel waarin u wenst op te nemen, ook selecteren met de toetsen Links en Rechts terwijl u zich in opname stand-by bevindt. De PLEXTALK doorloopt de titels op de SD-kaart.
- Stel de juiste opnameniveaus in en druk nogmaals op de toets Opname om de opname te starten.
- De nieuw opgenomen audio wordt toegevoegd aan het einde van de huidige titel, ongeacht waar u zich in de opname bevond toen u de procedure heeft gestart.

**Opmerking:** Aan het einde van de huidige titel wordt een nieuwe sectie gemaakt.

Als u wenst op te nemen in een nieuwe titel, kunt u eerst een nieuwe titel maken en daarna in die titel opnemen, of u kunt een nieuwe titel tijdens de opnameprocedure maken. Het maken van een nieuwe titel met behulp van het menusysteem wordt beschreven in paragraaf 6.16. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u tijdens de opnameprocedure een nieuwe titel maakt.

Maak als volgt een nieuwe DAISY-titel tijdens de opname:

- Druk op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- Stel de juiste opnameniveaus in zoals we reeds hebben gezien.
- Terwijl u zich in opname stand-by bevindt, gebruikt u de toetsen Links en Rechts om de titel te selecteren waarin u

wenst op te nemen. Als u naar Links of naar Rechts gaat, genereert de PLEXTALK een titel met de naam “nieuwe titel”.

- Markeer het item “nieuwe titel” en druk op de toets Opname.
- De PLEXTALK begint in de nieuwe titel op te nemen.
- Ga op de gebruikelijke manier verder met de opname en druk op Start/Stop om te eindigen.

## 6.9. Het opnameniveau instellen.

Als u een opname maakt, is het zeer belangrijk dat het opnameniveau juist is ingesteld. Als het niveau te laag is ingesteld, is het volume van de opname te stil. Als het opnameniveau te hoog is ingesteld, klinkt de opname vervormd.

Op de PLEXTALK kunt u het opnameniveau op 2 manieren aanpassen. De PLEXTALK beschikt over een AGC-functie “automatische volumeregeling”, die kan worden gebruikt met de ingebouwde microfoon, een externe microfoon of een lijnsignaal. U kunt het opnameniveau ook handmatig aanpassen. Het opnameniveau kan handmatig worden aangepast als u gebruik maakt van de interne microfoon, de externe microfoon of het lijnsignaal.

U kunt als volgt omschakelen tussen de AGC-instelling en de handmatige instelling van het opnameniveau:

- Druk op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “opname-instellingen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “automatische volumeregeling” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om “automatische volumeregeling uit” of “automatische volumeregeling aan” te selecteren, waarna u uw keuze bevestigt met de toets Enter. Het menusysteem wordt automatisch beëindigd.

**Opmerking:** Als u de “automatische volumeregeling” heeft ingeschakeld in opname stand-by, zegt de PLEXTALK herhaaldelijk “Automatisch”, om aan te geven dat het niveau automatisch wordt ingesteld.

U kunt het opnameniveau als volgt handmatig aanpassen:

- Zet de automatische volumeregeling op “uit”, zoals hierboven beschreven. Dit betekent dat u het opnameniveau handmatig instelt. U kunt het opnameniveau instellen van 0 tot 20 in stappen van 1.
- Druk één keer op de toets Opname om naar opname stand-by te gaan.
- Druk op de toets Op. Telkens wanneer u op de toets drukt, verhoogt het opnameniveau met één stap.
- Druk op de toets Neer. Telkens wanneer u op de toets drukt, vermindert het opnameniveau met één stap.
- Telkens wanneer u het opnameniveau aanpast, hoort u een pieptoon. U hoort een hogere pieptoon als u de hoogste of laagste instelling bereikt, en een lagere pieptoon in de middelste stand 10.
- Als u het opnameniveau sterk wenst te wijzigen, kunt u de toets ingedrukt houden. De PLEXTALK blijft het niveau dan verhogen of verlagen tot u de toets loslaat of tot de maximale of minimale instelling bereikt is.
- Terwijl u de aanpassingen uitvoert, geeft de PLEXTALK het nieuwe opnameniveau aan en hoort u “laag”, “goed” of “hoog”, om aan te geven dat het opnameniveau te laag is, juist is of te hoog is ingesteld. Zorg ervoor dat de PLEXTALK vaker “goed” zegt dan “laag” of “hoog”.

**OPGELET:** Als u audio opneemt terwijl de automatische volumeregeling ingeschakeld is, krijgt u niet altijd de gewenste opnamekwaliteit. In dit geval voert u de opname opnieuw uit met de automatische volumeregeling uitgeschakeld, zodat u het opnameniveau handmatig kunt aanpassen.

**OPGELET:** Als u de lijnuitgang van een cd-speler verbindt met de hoofdtelefoon- en lijnsignaal aansluiting van de PLEXTALK, kan de opname soms vervormd zijn, zelfs als u het opnameniveau aanpast.

In dit geval dient u de hoofdtelefoonuitgang van de cd-speler te verbinden met de hoofdtelefoon- en lijnsignaalingang van de PLEXTALK, waarna u het uitgangsvolume van de hoofdtelefoon op de cd-speler aanpast om het volume in te stellen.

**Opmerking:** Naast de hierboven vermelde methode kunt u voor bepaalde soorten opnamen, zoals opnamen van menselijke spraak, een goed opnameniveau krijgen door de positie van de microfoon t.o.v. de persoon aan te passen, of door luider of stiller te spreken.

**Opmerking:** Als de niveaumonitor uitgeschakeld is, hoort u de aankondigingen “laag”, “goed” of “hoog” niet.

## 6.10. De niveaumonitor gebruiken.

Met de niveaumonitor kunt u nagaan of het opnameniveau laag, goed of hoog ingesteld is, dan wel of het opnameniveau automatisch wordt ingesteld met de functie “automatische volumeregeling”. In de standaardinstelling van de PLEXTALK is de niveaumonitor ingeschakeld als u naar opname stand-by gaat. De niveaumonitor wordt automatisch stilgeschakeld als u daarna de opname start.

Soms wenst u het opnameniveau te controleren. Met de PLEXTALK kunt u dit als volgt doen.

Om de niveaumonitor in of uit te schakelen tijdens opname stand-by, opnamepauze of opname, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Titel.
- De PLEXTALK zegt “niveaumonitor aan” of “niveaumonitor uit”.
- Telkens u op de toets Titel drukt, wordt omgeschakeld tussen deze twee instellingen.
- Als de niveaumonitor ingeschakeld is, kunt u het opnameniveau naar wens verhogen of verlagen met de toets Op of Neer.
- Als u tevreden bent met het nieuwe opnameniveau, drukt u op de toets Titel om de niveaumonitor uit te schakelen.



**Opmerking:** Als de begeleidingsstrem tijdens de opname uitgeschakeld is, kondigt de PLEXTALK uw toetsaanslagen niet aan tijdens de opname. Als u dit wel wenst, dient u een hoofdtelefoon te gebruiken en de begeleidingsstrem in te schakelen, anders wordt de niveaumonitor eveneens opgenomen.

**Opmerking:** Met de niveaumonitor geeft de PLEXTALK aan of het opnameniveau laag, goed of hoog is, dan wel of het opnameniveau automatisch wordt ingesteld. Het eigenlijke opnameniveau wordt niet ingesteld met de niveaumonitor.

## 6.11. De opnamemonitor in- en uitschakelen.

Met de PLEXTALK kunt u de opname beluisteren terwijl u ze maakt, zodat u kunt nagaan hoe de opname uiteindelijk zal klinken. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de opnamemonitor kunt in- en uitschakelen.

U kunt de opnamemonitor in- of uitschakelen in opname stand-by, opnamepauze of opname. Dit gebeurt als volgt:

- Sluit een stereohoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonuitgang bovenaan de PLEXTALK. “Zie onderstaande opmerking”
- Druk één keer op de toets Bladwijzer om de opnamemonitor uit te schakelen.
- Druk nogmaals op de toets Bladwijzer om de opnamemonitor in te schakelen.
- Als u de opnamemonitor in- of uitschakelt, zegt de PLEXTALK welke instelling actief is.

**Opmerking:** U kunt de opnamemonitor enkel gebruiken als u een hoofdtelefoon heeft aangesloten. U hebt geen hoofdtelefoon nodig als u opneemt van een lijnsignaalbron.

**Opmerking:** Voor alle opnamen schakelt de PLEXTALK de opnamemonitor standaard in.

## 6.12. Opname-informatie opvragen.

In elk van de 3 opnametoestanden kunt u informatie over de actuele opnametoestand opvragen:

- In opname stand-by, drukt u één keer op cijfertoets 5. De PLEXTALK zegt de titelinformatie, de resterende opnametijd, informatie over de stroomvoorziening zoals de stroombron en de batterijstatus, de geluidskwaliteit, de ingangsbron en de instelling voor de “automatische volumeregeling”.
- In opnamepauze drukt u één keer op cijfertoets 5. De PLEXTALK zegt “pauze” gevolgd door de opgenomen tijd in de huidige sectie, de beschikbare resterende opnametijd op de SD-kaart, informatie over de stroomvoorziening zoals de stroombron en de batterijstatus, de geluidskwaliteit, de ingangsbron en de instelling voor de “automatische volumeregeling”.
- Tijdens de opname drukt u één keer op cijfertoets 5. De PLEXTALK zegt “opname”, gevolgd door de opgenomen tijd in de huidige sectie, de beschikbare resterende opnametijd op de SD-kaart en informatie over de stroomvoorziening zoals de stroombron en de batterijstatus.

**Opmerking:** Als de stembegeleiding tijdens de opname ingesteld is op “begeleiding uit”, hoort u deze informatie niet tijdens de opname. U hoort de informatie wel in opname stand-by en opnamepauze.

### **6.13. Kopmerkers bewerken tijdens de opname.**

Nu u de basisprincipes voor een opname heeft geleerd, wenst u misschien bepaalde DAISY-navigatiefuncties toe te voegen. Met de PLEXTALK kunt u kopinformatie instellen en annuleren tijdens of na het uitvoeren van de opname. Beide methoden zijn perfect geschikt; welke methode u gebruikt hangt af van het soort opname dat u maakt.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u kopmerkers instelt en annuleert tijdens het opnameproces.

**Tip:** Een kop is een merker die aan het begin van elke sectie in de DAISY-titel wordt ingevoegd. Een sectie in een DAISY-titel is de audio tussen twee opeenvolgende koppen.

Kopmerkers kunnen worden ingesteld als de opname gepauzeerd is of tijdens de eigenlijke opname. Beide methoden worden hierna beschreven:

- Als u een kop wenst in te stellen tijdens de opname, drukt u één keer op de toets GaNaar. De PLEXTALK zegt “kop XX”. De nieuwe kop wordt onmiddellijk ingesteld.
- Als u een kop wenst in te stellen terwijl de opname gepauzeerd is, drukt u één keer op de toets GaNaar. De PLEXTALK zegt “kop XX”. De kop wordt ingevoegd van zodra de opname opnieuw wordt gestart.
- Terwijl u zich nog steeds in opnamepauze bevindt, kunt u de kop annuleren door nogmaals op de toets GaNaar te drukken. De PLEXTALK zegt “kop XX geannuleerd”.

**Opmerking:** In de voorbeelden hierboven komt “XX” overeen met de kopmerker die werd ingesteld of geannuleerd. De PLEXTALK nummert koppen automatisch doorlopend vanaf het begin van de titel.

## **6.14. Kopmerkers bewerken na de opname.**

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u kopmerkers kunt instellen en annuleren nadat de opname werd gemaakt.

### **6.14.1. Een kop instellen na de opname.**

Als u een kop wenst in te stellen nadat de opname werd voltooid, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer bij benadering naar de plaats in uw opname waar u de kop wenst in te stellen.
- Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “kop instellen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK zegt dat u op het punt staat Kop XX in te stellen en vraagt u de positie in te stellen.
- U hoort dan 3 seconden audio die herhaaldelijk wordt weergegeven vanaf de locatie waar u zich op dat ogenblik in de opname bevindt.
- U kunt de koppositie aanpassen met de toets Links of Rechts.
- Gebruik deze toetsen om de positie van de kop in stappen van 0,1 seconde vooruit of achteruit te verplaatsen.
- Als u tevreden bent met de positie van de kop, drukt u op de toets Enter om de procedure af te sluiten.
- De PLEXTALK bevestigt dat de kop ingesteld is.

**Opmerking:** De koppen in de opname worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

**Opmerking:** De kopmerker wordt ingesteld aan het begin van de 3 seconden durende audioclip.

### 6.14.2. Een kopinstelling na de opname annuleren.

Als u een kop op de verkeerde plaats instelt, of als u per vergissing een kop heeft gemaakt op een plaats waar dit niet nodig is, kunt u de kop eenvoudig verwijderen.

Als u een kop na de opname wenst te annuleren, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer naar de locatie van de kop die u wenst te annuleren.

- Tijdens het afspelen of terwijl het afspelen gestopt is, drukt u één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “kop annuleren” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt u de annulering van de kop in kwestie te bevestigen.
- Als u deze kop effectief wenst te annuleren, drukt u op de toets Enter.
- De PLEXTALK bevestigt dat de kop geannuleerd is.

**Opmerking:** De resterende koppen worden automatisch vanaf het begin hernummerd.

## 6.15. Eén of meer secties wissen.

Met de PLEXTALK kunt u één of meer secties uit een DAISY-titel wissen. Ga daartoe als volgt te werk:

- Navigeer naar de titel waaruit u één of meer secties wenst te wissen.
- Ga vooruit of achteruit in de titel naar de positie van de eerste sectie die u wenst te wissen.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “bewerken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “sectie wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt u nu de eerste te wissen sectie te selecteren.
- Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met de toets Enter.

- De PLEXTALK vraagt u vervolgens de laatste sectie te selecteren die u wenst te wissen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om vooruit of achteruit te gaan in de titel tot u de gewenste sectie hoort, waarna u deze sectie selecteert met de toets Enter.
- Tenslotte vraagt de PLEXTALK om bevestiging voor u verdergaat. Druk op Enter om te bevestigen of op Annuleren om af te breken.
- Als u verdergaat, wist de PLEXTALK de secties en hoort u “verwijderd” als de bewerking voltooid is.

**Opmerking:** Als u slechts één sectie wenst te wissen, drukt u gewoon op Enter in dezelfde sectie voor de beginsectie en de eindsectie, en gaat u verder zoals bij het wissen van meerdere secties.

**Opmerking:** U kunt enkel meerdere secties wissen die op elkaar volgen. Als u meerdere secties wenst te wissen die niet op elkaar volgen, dient u elke sectie individueel te wissen.

**Opmerking:** De PLEXTALK past de kopnummering voor de resterende secties in de titel automatisch aan.

## 6.16. Een nieuwe titel maken.

Op één SD-kaart kunt u verschillende DAISY-titels maken. U wenst bijvoorbeeld dat de januari-editie van een audiotijdschrift de eerste titel is, de februari-editie de tweede titel, enz.

Als u een nieuwe titel op de SD-kaart wenst te maken terwijl u zich niet in opname stand-by bevindt, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “nieuwe titel maken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.

- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u op de toets Enter drukt, maakt de PLEXTALK een nieuwe titel en noemt deze “onbekend” tot u er vervolgens audio in opneemt.
- Roep deze map op de normale wijze op.

## 6.17. Een titel wissen.

Met de PLEXTALK kunt u titels op een SD-kaart of USB-medium wissen. Als u een titel wist, verwijdert u de titel en alle audio uit die titel.

Als u een titel wenst te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst te verwijderen.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “geselecteerde titel wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verdergaat. Druk op de toets Enter om te bevestigen of op de toets Annuleren om af te breken.

**Opmerking:** Als u de laatste titel op de cd of CF-kaart verwijdert, gaat de PLEXTALK ervan uit dat de cd of CF-kaart leeg is.

## 6.18. Een DAISY-titel opbouwen.

Het boekopbouwproces converteert een DAISY-titel die op de PLEXTALK werd opgenomen, naar een DAISY-boek dat kan worden

weergegeven op andere DAISY-hardwarespelers of op een pc met behulp van DAISY-afspeelsoftware. Als u het boekopbouwproces niet toepast op een titel nadat u de opname heeft gemaakt, kunt u deze titel niet weergeven op andere spelers dan de PLEXTALK. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het boekopbouwproces kunt uitvoeren.

Om het boekopbouwproces uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst op te bouwen.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “boek maken” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt of u verder wenst te gaan.
- Als u verder wenst te gaan, drukt u op de Enter; druk op de toets Annuleren om de procedure af te breken.
- De PLEXTALK zegt vooruitgangsberichten en kondigt de voltooiing aan.
- Als u de procedure tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

**OPGELET:** Als de batterij leeg geraakt tijdens het boekopbouwproces, is het mogelijk dat uw DAISY-titel niet kan worden weergegeven of kunnen alle gegevens op de SD-kaart beschadigd raken. Het is daarom ten stelligste aan te bevelen dat u gebruik maakt van netstroom voor u het boekopbouwproces start.

**Opmerking:** Het boekopbouwproces voor een DAISY-titel heeft tussen 30MB en 40MB ruimte op de SD-kaart nodig.

**Opmerking:** Als u het boekopbouwproces probeert uit te voeren op een titel die reeds opgebouwd is, zegt de PLEXTALK een foutmelding. Druk op de toets Menu om het menu te verlaten.

## 6.19. Bewerken van een DAISY-titel voorbereiden.



Als u reeds een opgenomen titel heeft opgebouwd of als u een titel van iemand anders heeft ontvangen en als u die titel wenst te bewerken, dient u de titel eerst voor te bereiden voor bewerking.

Als u een titel wenst voor te bereiden voor bewerking, gaat u als volgt te werk:

- Ga naar de titel die u wenst voor te bereiden voor bewerking.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “voorbereiden voor bewerking” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt of u verder wenst te gaan.
- Als u verder wenst te gaan, drukt u op de Enter; druk op de toets Annuleren om de procedure af te breken.
- Tijdens deze procedure zegt de PLEXTALK vooruitgangsberichten en kondigt hij de voltooiing aan.
- Als u de procedure tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

## **7. Spraakmemofuncties van de PLEXTALK gebruiken.**

U kunt de PLEXTALK niet alleen gebruiken als DAISY-speler, muzikspeler en DAISY-recorder, maar u kunt ook eenvoudige spraakmemo's opnemen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met uw PLEXTALK spraakmemo's kunt opnemen, beluisteren, verwijderen, informatie over spraakmemo's kunt opvragen of een reservekopie van spraakmemo's kunt maken.

### **7.1. Informatie opvragen over spraakmemo's.**

Als u de functie Spraakmemo gebruikt om informatie over de bestaande memo's op te vragen, gaat u als volgt te werk, ongeacht of de PLEXTALK al dan niet weergeeft:

- Druk één keer op cijfertoets 5.
- U hoort uiteenlopende informatie. Zie hierna voor meer details.
- Als u niet alle informatie wenst te beluisteren en de verschillende items sneller wenst te doorlopen, kunt u herhaaldelijk op cijfertoets 5 drukken.
- Als u de gewenste informatie heeft gehoord, kunt u de gesproken informatie stoppen met de toets Enter.

In de spraakmemofunctie hoort u de volgende items:

- Stroomverbruik - voedingsbron, batterijniveau.
- Spraakmemo-informatie - huidig nummer, totaal aantal en voor opname beschikbaar aantal.
- Tijdinformatie spraakmemo - beschikbare opnametijd.
- Titelinformatie - type, aantal titels.
- Tijdstempelinformatie - opnamedatum.
- Media-informatie.

## **7.2. Een nieuwe spraakmemo opnemen.**

Als u een nieuwe spraakmemo wenst op te nemen, gaat u als volgt te werk:

- Hou de toets Opname ingedrukt en spreek de memo in.
- Laat de toets los als u klaar bent.
- De PLEXTALK plaatst een nieuwe spraakmemo in het interne geheugen en keert daarna terug naar de titel waarin u zich bevond voor u de nieuwe spraakmemo opnam.
- Elke memo kan 1 minuut duren en er zijn maximaal 200 memo's.

**Opmerking:** U kunt geen continue spraakmemo opnemen die meer dan 1 minuut duurt. Als u de grens van 1 minuut probeert de overschrijden, stopt de PLEXTALK de opname automatisch.

**Opmerking:** De totaal beschikbare opnametijd voor spraakmemo's bedraagt 30 minuten. Het maximale aantal individuele memo's bedraagt 200.

**Opmerking:** Als de opgenomen tijd groter is dan 30 minuten of als het aantal memo's groter is dan 200, hoort u een waarschuwingsbericht. U dient dan overbodige spraakmemo's te verwijderen of een reservekopie van uw spraakmemo's te maken op een SD-kaart.

**Opmerking:** Voor spraakmemo's ligt de audiocompressie vast op MP3 32kbps mono.

**Opmerking:** Standaard wordt de spraakmemo voorzien van de datum en het tijdstip waarop hij werd opgenomen.

### 7.3. Bestaande spraakmemo's beluisteren.

U kunt uw bestaande spraakmemo's één voor één beluisteren of rechtstreeks naar een specifieke spraakmemo gaan.

Als u uw bestaande spraakmemo's één voor één wenst te beluisteren, gaat u als volgt te werk:

- Druk herhaaldelijk op de toets titel tot de PLEXTALK "spraakmemo" zegt.
- Gebruik de toets Links of Rechts om de bestaande spraakmemo's één voor één te doorlopen.
- Als u de huidige spraakmemo opnieuw wenst te beluisteren, drukt u op de toets Enter.

Als u rechtstreeks naar een bepaalde spraakmemo wenst te gaan, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets GaNaar.
- Geef met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste spraakmemo in en druk op de toets Enter.

- De PLEXTALK zegt een foutmelding als u een ongeldig nummer probeert in te geven.

**Opmerking:** U kunt rechtstreeks naar de laatste spraakmemo gaan door 0 in te geven en op de toets Enter te drukken.

## **7.4. Reservekopie van spraakmemo's maken op SD-kaart.**

Raadpleeg hoofdstuk 8.3 voor meer informatie over reservekopieën van spraakmemo's.

## **7.5. Spraakmemo's wissen.**

Als u één enkele spraakmemo wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Navigeer naar de spraakmemo die u wenst te wissen, zoals we reeds hebben gezien.
- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "spraakmemo" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie "geselecteerde spraakmemo wissen" te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als de procedure voltooid is, zegt de PLEXTALK "verwijderd".

Als u alle spraakmemo's wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:

- U kunt het hoofdmenu gelijk wanneer oproepen door één keer op de toets Menu te drukken.

- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “spraakmemo” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “alle spraakmemo’s wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder gaat. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als de procedure voltooid is, zegt de PLEXTALK “verwijderd”.

**Opmerking:** Als u een spraakmemo probeert te wissen terwijl er geen spraakmemo’s zijn, zegt de PLEXTALK een foutmelding.

## 8. Functies voor mediabeheer.

U hebt nu geleerd hoe u een DAISY-titel of spraakmemo maakt. Vervolgens is het belangrijk dat u uw media goed kunt beheeren. Met de PLEXTALK kunt u een reservekopie maken van uw gegevens en kunt u SD-kaarten en externe USB-media wissen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u deze procedures uitvoert voor DAISY-titels, spraakmemo’s, audiobestanden en tekstbestanden. Ook de eventuele beperkingen worden aangegeven.

### 8.1. Beschikbare media.

Dit hoofdstuk beschrijft de soorten media die geschikt zijn voor de PLEXTALK. De mogelijke mediatypes zijn:

#### **Intern geheugen:**

- Gebruikt om spraakmemo’s en spraakbladwijzers op te nemen en weer te geven. Bewerken is onmogelijk.
- Maximaal 30 minuten opnametijd.
- Maximaal 200 memo’s.

#### **SD-kaart:**

- Gebruikt om DAISY-inhoud op te nemen, te bewerken en weer te geven en om audiobestanden en tekstbestanden weer te geven. Bewerken van audiobestanden en tekstbestanden is niet mogelijk.
- Gebruikt om een reservekopie te maken van spraakmemo's en items op USB-media.

### **Externe USB-media:**

- Gebruikt om DAISY-inhoud, audiobestanden en tekstbestanden weer te geven. Opnemen en bewerken zijn onmogelijk.
- Gebruikt om een reservekopie te maken van items op de SD-kaart.

## **8.2. Algemene informatie over reservekopieën.**

Voor u een reservekopie van uw gegevens maakt, dient u met het volgende rekening te houden:

- Een reservekopie van het interne geheugen voor spraakmemo's en spraakbladwijzers kan enkel op een SD-kaart worden geplaatst. De reservekopie heeft de vorm van een DAISY-titel met navigatie op niveau 1 - elke spraakmemo wordt een afzonderlijke sectie in de titel.
- U kunt een reservekopie van uiteenlopende gegevens op de SD-kaart naar externe USB-media maken en vice versa. Een extern USB cd/dvd-station kan echter enkel als bron voor reservekopieën worden gebruikt.
- Tijdens het maken van de reservekopie geeft de PLEXTALK een mondelinge waarschuwing als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het bestemmingsmedium.
- Als u een reservekopie van een muziek-cd maakt met behulp van een extern USB cd/dvd-station, kunt u audiocompressie gebruiken. De reservekopie heeft het audiobestandsformaat en niet het DAISY-formaat.

### 8.3. Reservekopie maken van spraakmemo's.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van een spraakmemo in het interne geheugen naar een SD-kaart maakt.

- Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte.
- Navigeer naar de lijst met spraakmemo's zoals we reeds hebben gezien.
- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup "reservekopie" op te roepen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** Spraakmemo's worden als DAISY-titel opgeslagen met navigatie op niveau 1. Elke memo wordt als een afzonderlijke sectie opgeslagen.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

### 8.4. Reservekopie maken van DAISY-titels.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van DAISY-titels kunt maken tussen een SD-kaart en een extern USB-medium.

#### 8.4.1. Reservekopie maken van een DAISY-titel van een SD-kaart naar een extern USB-medium.

Als u een reservekopie wenst te maken van een DAISY-titel op een SD-kaart naar een extern USB-medium, gaat u als volgt te werk:

- Plaats de SD-bronkaart.

- Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan.
- Navigeer op de SD-kaart naar de titel waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup “reservekopie” op te roepen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB cd/dvd-station.

**Opmerking:** Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het externe bestemmingsmedium, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die vereist is voor het maken van de reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel. Meer informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor DAISY-media”.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

#### **8.4.2. Reservekopie maken van een DAISY-titel van een extern USB-medium naar een SD-kaart.**

- Als u een reservekopie wenst te maken van een DAISY-titel van een extern USB-medium naar een SD-kaart, gaat u als volgt te werk:
- Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de kaart niet vergrendeld is.
- Sluit het externe USB-medium aan.
- Navigeer op het externe USB-medium naar de DAISY-titel waarvan u een reservekopie wenst te maken.



- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup “reservekopie” op te roepen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SD-bestemmingskaart, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die vereist is voor het maken van de reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel. Meer informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor DAISY-media”.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

### 8.4.3. Reservekopietijd voor DAISY-media.

De volgende reservekopietijden gelden voor items in DAISY-formaat:

- Een reservekopie maken van een cd van ongeveer 600MB capaciteit van een extern USB cd/dvd-station naar een SD-kaart neemt ongeveer 25 minuten in beslag.
- Een reservekopie van 600MB gegevens maken van een SD-kaart naar een extern USB Flash-geheugen neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

## 8.5. Reservekopie maken van audiobestanden/muziek-cd.

Met de PLEXTALK kunt u een reservekopie maken van een extern USB-medium naar een SD-kaart. U kunt in één keer een reservekopie maken van een volledig album. U kunt ook een reservekopie maken van een SD-kaart naar een extern USB-medium,

behalve een cd/dvd-station. Dit hoofdstuk beschrijft hoe u deze beide procedures kunt uitvoeren.

### **8.5.1. Reservekopie maken van audiobestanden van een SD-kaart naar een extern USB-medium.**

Als u een reservekopie wenst te maken van audiobestanden van een SD-kaart naar een extern USB-medium, gaat u als volgt te werk:

- Plaats de SD-kaart met de audiobestanden waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan.
- Navigeer op de SD-kaart naar het album waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup “reservekopie” op te roepen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u op de toets Enter drukt, begint de PLEXTALK met het maken van de reservekopie. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB cd/dvd-station.

**Opmerking:** Als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is in het externe USB-bestemmingsmedium, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die vereist is voor het maken van de reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel. Meer informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor audiobestanden/muziek-cd”.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

## 8.5.2. Reservekopie maken van audiobestanden/muziek-cd naar een SD-kaart.

Als u een reservekopie wenst te maken van audiobestanden/muziek-cd van een extern USB-medium naar een SD-kaart, gaat u als volgt te werk:

- Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de kaart niet vergrendeld is.
- Sluit het externe USB-medium aan waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Indien nodig plaatst u de muziek-cd in het externe USB cd/dvd-station.
- Navigeer op het externe USB-medium naar het album waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup “reservekopie” op te roepen.
- Als u een reservekopie maakt van een muziek-cd, drukt u op de toets Links of Rechts om naar de gewenste audiocompressie te gaan, waarna u op de toets Enter drukt om uw selectie te bevestigen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u op de toets Enter drukt, begint de PLEXTALK met het maken van de reservekopie. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** De optie Audiocompressie is enkel beschikbaar als u een reservekopie maakt van een muziek-cd.

**Opmerking:** Als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is op de SD-kaart, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan.

**Opmerking:** De tijd die vereist is voor het maken van de reservekopie is afhankelijk van de grootte van de brontitel. Meer informatie vindt u verderop in het hoofdstuk “Reservekopietijd voor audiobestanden/muziek-cd”.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

### **8.5.3. Reservekopietijd voor audiobestanden/muziek-cd.**

Voor de beschikbare bemonsteringssnelheden en bitsnelheden gelden de hierna vermelde reservekopietijden bij benadering:

#### **Reservekopie maken van ongeveer 70 minuten audio van een muziek-cd naar een SD-kaart:**

- PCM 44,1kHz stereo: ongeveer 35 minuten.
- MP3 256K stereo: ongeveer 80 minuten.
- MP3 128K stereo: ongeveer 70 minuten.

#### **Reservekopie maken van ongeveer 70 minuten audio van een SD-kaart naar een extern USB Flash geheugen:**

- PCM 44,1kHz stereo: ongeveer 20 minuten.
- MP3 256K stereo: ongeveer 30 minuten.
- MP3 128K stereo: ongeveer 30 minuten.

## **8.6. Reservekopie maken van tekstbestanden.**

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een reservekopie van tekstbestanden kunt maken van een SD-kaart naar een extern USB-medium.

### **8.6.1. Reservekopie maken van een tekstbestand van een SD-kaart naar een extern USB-medium.**

Als u een reservekopie wenst te maken van een tekstbestand van een SD-kaart naar een extern USB-medium, gaat u als volgt te werk:

- Plaats de SD-kaart met de tekstbestanden waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Sluit een extern USB-medium met voldoende vrij ruimte aan.

- Navigeer op de SD-kaart naar het tekstbestand waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup “reservekopie” op te roepen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** U kunt geen reservekopie maken naar een extern USB cd/dvd-station.

**Opmerking:** Als er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar is op het externe opslagmedium, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

### **8.6.2. Reservekopie maken van een tekstbestand van een extern USB-medium naar een SD-kaart.**

Als u een reservekopie wenst te maken van een tekstbestand van een extern USB-medium naar een SD-kaart, gaat u als volgt te werk:

- Plaats een SD-kaart met voldoende vrije ruimte en ga na of de kaart niet vergrendeld is.
- Sluit het externe USB-medium aan waarin de tekstbestanden zitten waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Navigeer op het externe USB-medium naar het tekstbestand waarvan u een reservekopie wenst te maken.
- Druk één keer op cijfertoets 9 om de functie Backup “reservekopie” op te roepen.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met de reservekopie. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.

- Als u wenst verder te gaan, start de procedure om de reservekopie te maken. De PLEXTALK geeft aan wanneer de reservekopie voltooid is.

**Opmerking:** Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SD-bestemmingskaart, geeft de PLEXTALK de vereiste capaciteit aan.

**Opmerking:** Als u het reservekopieproces tijdens de uitvoering wenst te annuleren, drukt u op de toets Annuleren.

## 8.7. Een SD-kaart wissen.

Met de PLEXTALK kunt u een SD-kaart een onbeperkt aantal keren wissen. Als u een SD-kaart wenst te wissen, gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “SD-kaart wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met het formatteren. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het formatteerproces. De PLEXTALK geeft aan wanneer het proces voltooid is.

**Opmerking:** Als de SD-kaart gewist is, beschouwt de PLEXTALK dit als een lege SD-kaart.

**Opmerking:** Als de functie “SD-kaart wissen” wordt uitgevoerd, worden alle gegevens op de SD-kaart gewist.

## 8.8. Een extern USB medium wissen.

Met de PLEXTALK kunt u een extern USB-medium een willekeurig aantal keren wissen. Als u een extern USB-medium wenst te wissen gaat u als volgt te werk:

- Druk één keer op de toets Menu om het hoofdmenu op te roepen.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “mediabeheer” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- Gebruik de toets Links of Rechts om naar de optie “USB wissen” te gaan, waarna u deze optie selecteert met de toets Enter.
- De PLEXTALK vraagt om bevestiging voor u verder kunt gaan met het formatteren. Druk nogmaals op de toets Enter om verder te gaan of op de toets Annuleren om af te breken.
- Als u bevestigt dat u verder wenst te gaan, start het formatteerproces. De PLEXTALK geeft aan wanneer het proces voltooid is.

**Opmerking:** Als het externe USB-medium gewist is, beschouwt de PLEXTALK dit als een leeg extern USB-medium.