

 slechtziend.nl	Document	Versie: versie 1.1
	Handleidingen: FO loepen 3,5 en 5X	Ingangsdatum: 1-08-2025
		Documentnummer: 434000 434001 Owner: slechtziend.nl

Handleiding

FO schuifloepen 3,5X en 5X



Loep inschakelen

1. Houd de loep vast bij de twee uitstulpingen en schuif deze omhoog.
2. U hoort een zachte klik; de LED-verlichting gaat nu aan.
3. Zorg voor de juiste afstand tussen de loep en het object dat u wilt bekijken/lezen.

Loep uitschakelen

1. Plaats de palm van uw hand op het bovenste gedeelte van de loep en druk deze terug in de behuizing.
2. De verlichting schakelt automatisch uit zodra de loep volledig is ingeschoven.

 slechtziend.nl	Document Handleidingen: FO loepen 3,5 en 5X	Versie: versie 1.1 Ingangsdatum: 1-08-2025 Documentnummer: 434000 434001 Owner: slechtziend.nl
--	--	---

Loep opladen

- 1. Sluit de USB-C-kabel aan op de onderzijde van de loep.**
- 2. Verbind de andere kant van de kabel met een USB stekker (niet meegeleverd).**
- 3. Tijdens het opladen brandt een rood LED-lampje. Wanneer de accu volledig is opgeladen, verandert dit lampje naar groen.**

Let op:

Schuif de loep altijd terug in de behuizing wanneer u deze niet gebruikt. Dit voorkomt beschadiging aan de lens en bespaart energie.