

GEBRUIKSAANWIJZING

Digitale Dementieklok & Kalender met Medicatie-herinnering

1. BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Duidelijke weergave:** Niet-verkorte weergave van dag, periode van de dag, tijd en datum.
- **3 Schermweergaves:** Keuze uit Normaal (zwart-wit), Rood-Wit-Blauw of Analoge klokweergave.
- **Medicatie & Alarmen:** 3 instelbare medicatie-herinneringen en 5 verschillende groepen alarmen.
- **Nachtmodus:** Automatisch dimmen van de schermhelderheid tussen 20:00 en 07:00 uur.
- **Meertalig:** Ondersteunt 9 talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Fins, Pools).

2. KNOPBEDIENING (ACHTERZIJDE KLOK)

Knop	Functie & Bediening
MENU	Open of sluit het instellingenmenu.
POWER	Aan- en uitschakelen van het apparaat.
▲ OMHOOG / ▼ OMLAAG	Navigeer door de verschillende menu-opties.
◀ LINKS / RECHTS ▶	Pas waarden aan (zoals uur, minuut of datum).
OK / ENTER	Bevestig keuze / Wissel direct van schermweergave.

Snel wisselen van schermweergave:

Houd op het hoofdscherm de **OK / ENTER** knop enkele seconden ingedrukt om direct te schakelen tussen de 3 weergaves (Zwart-wit, Rood-Wit-Blauw, Analoo).

3. MENU INSTELLINGEN OVERZICHT

Druk op de knop **MENU** om het menu te openen. Gebruik **OMHOOG/OMLAAG** om een regel te selecteren (geel gemarkeerd). Druk op **OK** om de instelling te wijzigen.

Menu Optie	Mogelijke Waarden	Omschrijving & Bediening
1. Taal	Nederlands, Engels, Duits, etc.	Selecteer de gewenste taal voor het gehele systeem.

Menu Optie	Mogelijke Waarden	Omschrijving & Bediening
2. Tijd	00:00 - 23:59	Stel het uur en de minuten in. Gebruik LINKS/ RECHTS om te navigeren.
3. Datum	Dag / Maand / Jaar	Stel de huidige datum nauwkeurig in.
4. Tijd mode	12-uur / 24-uur	Kies tussen 12-uurs weergave (met AM/PM) of 24-uurs indeling.
5. Datum mode	DD-MM-YYYY / MM-DD-YYYY	Kies de gewenste volgorde van dag, maand en jaar.
6. Automatische helderheid	Aan / Uit	Aan: Normale helderheid (07:00-19:59 uur). Dimt automatisch naar lage helderheid (20:00-06:59 uur).
7. Volume	Niveau 00 t/m 30	Stel het geluidsvolume in voor de alarmen en herinneringen.
8. Alarm instelling	5 Alarmgroepen	Stel de alarmtijd en frequentie in (Eenmalig, Dagelijks, Ma t/m Vr, Za & Zo).
9. Medicatieherinnering	3 Groepen (Ochtend, Middag, Avond)	Stel specifieke medicatietijden en herinneringssignalen in.
10. Fabrieksinstellingen	Reset (V5.1)	Druk op OK om alle instellingen te herstellen naar de fabrieksstand.

4. DAGDELEN INDELING

De klok geeft de periode van de dag automatisch aan op basis van de volgende tijden:

Tijdslot	Aangeduid Dagdeel
06:00 – 11:59	Ochtend (Morning)
12:00 – 17:59	Middag (Afternoon)
18:00 – 23:59	Avond (Evening)
00:00 – 05:59	Nacht (Night)

5. INHOUD VAN DE VERPAKKING

- 1x Digitale Dementieklok
- 1x 5V/2A Voedingsadapter

- 1x Handleiding